

美国原装DMS电动肌肉振动仪

产品名称	美国原装DMS电动肌肉振动仪
公司名称	山东沐恒医疗科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	产地:美国
公司地址	山东省潍坊市高密市醴泉街道人民大街（西）1777号（注册地址）
联系电话	15689810326

产品详情

美国原装DMS电动肌肉振动仪

美国进口DMS电动肌肉振动仪的日常维护事项：为了更好的保护和延长DMS深层肌肉刺激仪的使用寿命，请您做到以下几点：1、每次使用前，请连接好电源，确定电压是恒定的。2、使用过程中，请拿稳仪器，尤其是在停止使用时，一定要把仪器放在安全的地方（不至于掉在地上）。3、每次运行DMS深层肌肉刺激器时间不应超过两个小时，其中使用半个小时后，应关闭电源，让仪器停止工作五分钟。4、治疗师在使用DMS深层肌肉刺激仪时，手握在仪器手柄的末端，这样治疗师省力，产生的振动压力也比较大。最好不要对仪器使用太大的压力，不至于仪器在静止情况下工作，这样就更好的保护电动机。5、使用时，如听到有杂音或者仪器有点顿，这时应该停止使用，需滴加润滑油。一般每隔一周滴加油（把振动头拧下，滴6-7滴油在孔内），滴油后朝上振动五分钟，滴油后朝下振动三分钟，擦净残油，拧上振动头，上下振动一分钟。（如下图）6、使用结束后，把仪器置于通风的地方，这样更有利于散热。7、把电源线按原来的方式卷起，各配件按包装盒规定的位置放好。

DMS肌肉振动刺激仪的相关适应症：1、慢性软组织疼痛：肩周炎，颈椎病，腰椎病，臀上皮神经炎，膝关节疼痛综合症，过度疲劳，肌肉拉伤。2、偏头痛、外周神经损伤、中枢神经损伤后肌肉软组织功能障碍：偏瘫、截瘫等所致肌肉痉挛、挛缩。3、使用美国DMS深层肌肉治疗仪可以治疗颞下颌关节紊乱综合症、脊柱小关节。4、骨折术后及松解术后的关节肌肉软组织挛缩。5、腱鞘炎、网球肘、足底筋膜炎。6、下背痛、脊柱畸形、髌膝踝等骨关节病。DMS深层肌肉刺激仪的禁忌症：1、心脏病、关节置换术后局部内固定患者、肿瘤癌症、近期脑出血、严重糖尿病、局部皮肤破损、局部动脉斑块、不能耐受振动的部位、中枢神经受压（脊髓型颈椎病等）、骨折脱位、肾结石部位等。2、不能使用的部位：眼睛、牙齿、隆胸、癌细胞、电子设备或假肢、螺丝钉等金属物。3、关于糖尿病患者，美国DMS电动深层肌肉刺激仪只能在脚底和手部使用。4、骨折处不可使用DMS。5、孕妇、小于16岁的少年儿童（因为生长连结面（骨骺）处血管丰富）。6、不能在水中或湿润环境中使用DMS。