

# 健升/jiansheng脊椎测凹卡/Scoliosis Meter

产品名称	健升/jiansheng脊椎测凹卡/Scoliosis Meter
公司名称	华力争（天津）电子科技有限公司
价格	2500.00/个
规格参数	
公司地址	天津市津南区葛沽镇滨海民营经济成长示范基地会展经济中心607室38号（注册地址）
联系电话	18920835289

## 产品详情

产品概述：

脊柱侧凸测量仪测量背部畸形的旋转程度。用它来筛选哪些人需要进一步的医学评估。

尺寸：16.2\*6.2\*1.3cm

重量：0.5kg

脊柱侧弯测量尺Scoliosis Meter的使用方法

- 1 患者直立，测量者从后面观察。
- 2 让患者双手手掌相对合拢，如入水前的姿势。
- 3 让患者缓缓向前屈躯直到双肩与髌平齐，从后侧观察患者。为了得到更准确的观察效果，观察者的双眼好与患者的背部在同一高度。注意背部是否有不对称或者高低不平。
- 4 在测量之前，将患者屈躯的角度调整到使得背部高低差别大的时候。这个角度的具体位置因人而异：举例来说，侧弯发生在腰部时，测量的时候就需要患者有更大角度的屈躯（相对侧弯发生在胸椎的人）。
- 5 测量过程中将测量尺轻置于背部，测量尺的0刻度始终至于脊柱的上方，待滚珠稳定后，读取显示的度数。
- 6 如果胸部和腰部都有侧弯，需要同时在胸部和腰部进行测量，这种情况下通常两个部位的隆起方向是相反的（如胸背部隆起在右侧时腰背部隆起在左侧）。

7 如果测量度数大于 $7^{\circ}$ ，脊柱发生侧弯的可能性非常大，需要立即到医疗机构进行进一步的检查。如果度数小于 $7^{\circ}$ ，可暂不做处理，但每三到六个月做一次复查。