

艾暖腰腹贴暖宫贴热敷贴暖宝宝贴发热贴暖贴暖宝宝批发源头工厂

产品名称	艾暖腰腹贴暖宫贴热敷贴暖宝宝贴发热贴暖贴暖宝宝批发源头工厂
公司名称	青岛沃普艾斯日用品有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Inuan/艾暖 规格:310mm*125mm 产地:山东省
公司地址	青岛市市南区香港中路18号福泰广场A1002户
联系电话	18863996556 18863996556

产品详情

产品说明：

产品规格：310mm*125mm

包装：1片/袋*3袋/盒

使用期限：二年

注册证号：鲁械注准20182090336

生产许可证号：鲁食药监械生产许20130093号

贮存：应置于阴凉干燥处存放，避免阳光直射

产品性能：

本产品由高浓缩发热料、无纺布袋、粘贴明胶、外包装袋组成。发热料由铁粉、水、活性炭、蛭石、食盐、高分子吸水树脂组成。

适用范围：

适用于女性经期小腹冷痛、月经失调、产妇暖宫、流产暖宫，软组织损伤、关节疼痛、腰腿痛、胃寒、肩周炎、颈椎病的辅助制疗，本品不与皮肤直接接触。

产品特点：

温宫护巢，有效缓解宫寒、痛经、月经不调等不良症状，对于小产及产后的子宫恢复起到很好的辅助作用，有活血化瘀，温经止痛、改善血液循环的良好功效。

使用说明：

- 1、沿缺口处撕开外包装袋，取出内袋，待几分钟升温后揭去剥离纸；
- 2、将上面的粘贴明胶贴附（在需要热敷部位内衣外侧，用手铺平即可。）

注意事项：

本品拆封后即开始发热，不使用产品时请勿拆开包装。

- 1、请注意低温烫伤。低温烫伤是指：将比体温高的发热体长时间与身体接触，会引起红斑、水泡等症状的烫伤，如出现此症状请立即停止使用，建议请医生就诊。
- 2、防止低温烫伤要注意：避免长时间敷于同一个地方；请不要就寝时实用；请不要和供暖设备一起使用。
- 3、请勿入口，如误食请马上漱口并立即请医生就诊。
- 4、孕妇及婴幼儿忌用。
- 5、皮肤病、糖尿病、高热患者、生活不能自理者慎用。
- 6、请不要放置在儿童能够触及的地方。
- 7、本品为一次性使用，使用过程中如感觉温度过高应立即取下暂停使用。
- 8、本品不与皮肤直接接触，请隔衣物实用。
- 9、请在有效期内使用。