

# 内窥镜清洗消毒槽胃镜肠镜膀胱镜清洗槽耳鼻喉镜冲洗消毒水槽

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 内窥镜清洗消毒槽胃镜肠镜膀胱镜清洗槽耳鼻喉镜冲洗消毒水槽        |
| 公司名称 | 泰州市泰仕洁医疗器械有限公司                      |
| 价格   | .00/个                               |
| 规格参数 |                                     |
| 公司地址 | 泰州市医药高新技术产业开发区华润国际花园10幢2705西侧（注册地址） |
| 联系电话 | 15366718429                         |

## 产品详情

卫生部《内镜清洗消毒技术操作规范(2004版)》 内窥镜清洗消毒槽，根据卫生部《内镜清洗消毒技术操作规范(2004版)》（卫医发100号）第十一条的要求精心研制而成。内窥镜清洗消毒槽工作原理（流程）是通过流动水水洗、酶洗、消毒浸泡、流动水清洗，实现对内镜充分的清洗和消毒。内窥镜清洗消毒槽分为四槽和五槽两种基本型号，适用于对胃镜、肠镜、喉镜、气管镜、支气管镜等医用内镜的清洗消毒。本产品采用美国（杜邦公司）、日本（三菱公司）进口材料，具有耐腐蚀，抗冲击力强，牢固性高，使用方便、清洗效果好等特点。经上海长海医院、瑞金医院、仁济医院、浙医附院、广州医学院附院、湖南医大附属湘雅医院、江苏省人才医院、福建省立医院、山东省立医院、山西医大附属二院、白求恩国际和平医院等一大批内窥镜专家使用后一致认可，被推广应用。清洗步骤四槽洗法：流水洗——酶洗——浸泡消毒（2%

碱性戊二醛）——冲洗（喷洒）五槽洗法：流水洗——酶洗——清洗——浸泡消毒（2%

碱性戊二醛）——冲洗（喷洒） 胃镜、肠镜、十二指肠镜浸泡：不少于 10

分钟 支气管镜、喉镜浸泡不少于 20

分钟； 结核杆菌、其他分枝杆菌等特殊感染患者使用后的内镜浸泡不少于 45

分钟。清洗方法和要求详见《内镜清洗消毒技术操作规范(2004版)》产品特点内窥镜清洗消毒槽设计精巧、结构合理：无需通电，安全耐用；无需培训，操作简单（按照《规范》要求进行即可）。清洗槽、消毒槽进水以及消毒槽下水均装有ABS球阀，对水的流量和流速进行自由调控；消毒槽上配有密封盖，有效防止消毒剂的挥发，保证消毒效果。完好配备上、下水管和接水龙头，客户只需5—10分钟即可全部安装完毕、投入使用。为方便医务人员的清洗消毒工作，内窥镜清洗消毒槽下部特设有储存柜，可存放消毒试剂、手套等医疗器械。