

医用夜拐福仕得质量好

产品名称	医用夜拐福仕得质量好
公司名称	中山市福仕得健身器材有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:福仕得 材质:铝合金 产地:广东中山
公司地址	中国广东中山火炬开发区丹丽路17号
联系电话	86 760 28123553 18689380045

产品详情

中山市福仕得健身器材有限公司,位于享有广东省曲艺之乡（粤剧）、华侨之乡的美誉。连续多年保持广东省第5的经济总量，并与顺德、南海、东莞一起被称为广东四小虎的中山市,注册地址在广东,中山,中山火炬开发区丹丽路17号A幢厂房1楼、2楼D区、3楼A区,公司性质属于有限责任公司(自然人投资或控股),注册资本为500万人民币,自2012-06-07成立。

主要经营：研发、生产、销售：健身器材、五金制品、塑料制品、浴室用品、模具、一类医疗器械；第二、三类医疗器械生产企业,（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,,,面向全国提供优质的产品和服务,如有业务联系请联系我公司蔡先生。

公司以诚信为本，求实创新，以客户为导向、以高标准服务为导向，以“勤勉、创新、博大、开放”为企业精神，向广大消费者提供物美价廉的产品和良好服务。

功能：水平腋托,铝合金材质，握把、腋托、脚管高度均可调节，可以分体式折叠，易于携带，免安装，辅助前行，适合135-200CM身高人士；

基本参数：

1.尺寸：98-158CM可调节；净重：1.86KG每对；

2.以 GB/T 19545.2-2009《单臂操作助行器要求和试验方法第2部分：腋拐》国家标准，作为设计生产的参照标准，其结构特点如下：

2.1) 主架：采用6063T5高强度铝合金材质，腋托\脚管和握把均可调高低，适合不同身高人士,主管管壁厚度1.1MM，脚管和伸缩管管壁厚度1.2MM；主架可拆分成两截,方便携带.配便携式手提袋.

2.2) 腋托和手托：采用加厚TPR材质，防滑、防过敏，舒适，无异味；

2.3) 脚垫：加厚加大橡胶脚垫，脚垫里面有铁垫片防止穿透脚垫，耐用，防滑。

1.4 使用方法及注意事项：

1.4.1使用方法：

1.4.1.1 双手同事按下两边的弹珠，对正下支孔位，用力将上支往下压，知道弹珠弹出到下支孔外。

1.4.1.2 将E型扣打开，双手同时按下两边弹珠，后将腋托调节到合适的孔位，直到弹出到孔外。

1.4.1.3 将握把调到合适的孔位，E型扣孔位要对正铝管的孔位。

1.4.1.4 将两边E型扣压上锁紧。

1.4.1.5 调节脚管高度方法：用一只手将脚管上的前后弹珠同时按下，另一只手将脚管往外拉，直到调到舒适的高度。

1.4.2注意事项：使用前仔细检查各个部位，如发现低端易损件异常，请及时更换。使用前确保调节键调节到位，即听到“咔哒”一声才可使用。切勿将产品放置在高温或者低温环境中，否则会造成橡胶件老化及弹力不足的现象。本产品应放置在干燥，通风，平稳，无腐蚀性物质的室内。每周定期检查产品是否良好。