

# 腰椎牵引带A康隆达腰椎牵引带A腰椎牵引带生产厂家

产品名称	腰椎牵引带A康隆达腰椎牵引带A腰椎牵引带生产厂家
公司名称	安平县康博医疗器械有限公司
价格	35.00/件
规格参数	品牌:康隆达 型号:大中小 产地:河北省安平县
公司地址	河北省衡水市安平县
联系电话	0318-8091006 15127820006

## 产品详情

### 腰椎牵引带A康隆达腰椎牵引带A腰椎牵引带生产厂家

腰椎牵引带简介：主要用于腰椎骨折牵引，腰椎骨质增生牵引，腰椎盘突出症的牵引，此产品用优质软性材料制成，上面有魔术贴可以用来调节松紧。适合骨盆全形，贴身，舒适，拉力均匀，避免皮肤损伤，可持重25-40公斤。

#### 腰椎牵引带使用方法：

- 1、将腰椎牵引带两片分开，分别系于两端床头上（可用绳索连接牵引带子）。
- 2、患者躺在床上，将两片牵引带分别系牢固定在腰部、胸部，身体应尽量向上挺伸，将牵引带拉紧（系于床头的带子长短须一致）另一头加重物来调牵引力的大小根据医生建议选择合适的力度。
- 3.每天睡前牵引一次,时间以20-30分钟为宜,牵后即平躺休息,患者也可根据自己需要灵活调整时间和次数.10天为1疗程,2-3个疗程可明显见效,希望患者能够坚持牵。

#### 腰椎牵引带注意事项：

- 1、固定胸围带时，身体应尽力向上挺伸，胸围牵引带拉紧，以免无效牵引行程过长而影响效果。
- 2、牵引力量应以能忍受为宜，勿过度牵引，造成不良后果。
- 3、牵引完毕后，应卧床休息30-60分钟，以保证牵引效果。

4、牵引后，颈部或腰部若有酸困不适，疼痛感觉，卧床休息后自行消除。

腰椎牵引带产品规格：

大号长105厘米，中号长97厘米，小号长90厘米。