福仕得助行器差价厂家直销

产品名称	福仕得助行器差价厂家直销
公司名称	中山市福仕得健身器材有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:福仕得 材质:材质 产地:广东中山
公司地址	中国广东中山火炬开发区丹丽路17号
联系电话	86 760 28123553 18689380045

产品详情

中山市福仕得健身器材有限公司专业生产轮椅、拐杖、助行器、洗澡椅、坐便椅、电动轮椅等,公司是一家集研发,生产,销售,电子商务于一体的现代化医疗集团企业,下有子公司中山市雅德医疗康复器械有限公司,中山市雅德商贸有限公司。

集团通过ISO13485:2003, ISO9001:2008国际质量体系认证,并获得国家单位颁发的AAA级重合同守信用企业。

现工厂直销,批发代发,诚招代理,欢迎致电咨询!

18689380045 蔡先生

功能:铝合金材质,轮式便携结构,高度可调,可折叠

图片:

基本参数:

- 1、尺寸:长48CM:宽54.5CM;高72.5~89.5CM;折叠后尺寸:16*16*(79-96)CM,承重:100KG;净重:2.7 KG;
- 2、以GB/T 14728.2-2008《双臂操作助行器要求和试验方法 第2部分:轮式助行架》国家标准作为设计生产执行标准,其结构特点如下:
- 2.1) 主架:采用6061F高强度加粗加筋铝合金材质,管直径为25.4mm和28.8mm两种规格,厚度为1.2MM,表面采用阳极氧化处理,塑料扣提拉式折叠方式,傻瓜式操作。高度调节采用扶手调节方式,8档可调,扶手管装弹珠的位置处开有凹槽,防止调节高度时扶手跑偏。管与管的连接处全部采用塑料件连接,美观大方不伤手,腿管处有弧形加固杆设计,使主架更为稳固且防止撞击腿部。
- 2.2) 握把:采用海棉握把,手感柔软舒适;
- 2.3) 脚垫:前脚管配备4寸PVC定向静音轮,方便移动。后脚管配备雪橇式工程塑料防滑脚套。
- 1.4 使用方法及注意事项:
- 1.4.1使用方法:将扶手往两边,用力按下折叠键,按到底。再卡上固定杆即可。将固定杆卡扣,握把折叠往上拉到顶,将握把往中间收紧即可。按下调节弹珠的同时,拉动调节握把即可。
- 1.4.2注意事项:使用前仔细检查各个部位,如发现低端易损件异常,请及时更换。使用前确保调节键调节到位,即听到"咔哒"一声才可使用。切勿将产品放置在高温或者低温环境中,否则会造成橡胶件老化及弹力不足的现象。本产品应放置在干燥,通风,平稳,无腐蚀性物质的室内。每周定期检查产品是否良好。