

福仕得助行器差价厂家直销

产品名称	福仕得助行器差价厂家直销
公司名称	中山市福仕得健身器材有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:福仕得 材质:材质 产地:广东中山
公司地址	中国广东中山火炬开发区丹丽路17号
联系电话	86 760 28123553 18689380045

产品详情

中山市福仕得健身器材有限公司专业生产轮椅、拐杖、助行器、洗澡椅、坐便椅、电动轮椅等，公司是一家集研发，生产，销售，电子商务于一体的现代化医疗集团企业，下有子公司中山市雅德医疗康复器械有限公司，中山市雅德商贸有限公司。

集团通过ISO13485：2003，ISO9001：2008国际质量体系认证，并获得国家单位颁发的AAA级重合同守信用企业。

现工厂直销，批发代发，诚招代理，欢迎致电咨询！

18689380045 蔡先生

功能：铝合金材质，轮式便携结构，高度可调，可折叠

图片：

基本参数：

1、尺寸：长48CM；宽54.5CM；高72.5~89.5CM；折叠后尺寸：16*16*(79-96)CM，承重：100KG；净重：2.7KG；

2、以GB/T 14728.2-2008《双臂操作助行器要求和试验方法

第2部分：轮式助行架》国家标准作为设计生产执行标准，其结构特点如下：

2.1) 主架：采用6061F高强度加粗加筋铝合金材质，管直径为25.4mm和28.8mm两种规格，厚度为1.2MM，表面采用阳极氧化处理，塑料扣提拉式折叠方式，傻瓜式操作。高度调节采用扶手调节方式，8档可调，扶手管装弹珠的位置处开有凹槽，防止调节高度时扶手跑偏。管与管的连接处全部采用塑料件连接，美观大方不伤手，腿管处有弧形加固杆设计，使主架更为稳固且防止撞击腿部。

2.2) 握把：采用海棉握把，手感柔软舒适；

2.3) 脚垫：前脚管配备4寸PVC定向静音轮，方便移动。后脚管配备雪橇式工程塑料防滑脚套。

1.4 使用方法及注意事项：

1.4.1使用方法：将扶手往两边，用力按下折叠键，按到底。再卡上固定杆即可。将固定杆卡扣，握把折叠往上拉到顶，将握把往中间收紧即可。按下调节弹珠的同时，拉动调节握把即可。

1.4.2注意事项：使用前仔细检查各个部位，如发现低端易损件异常，请及时更换。使用前确保调节键调节到位，即听到“咔哒”一声才可使用。切勿将产品放置在高温或者低温环境中，否则会造成橡胶件老化及弹力不足的现象。本产品应放置在干燥，通风，平稳，无腐蚀性物质的室内。每周定期检查产品是否良好。