

医用冷敷头带代加工工厂 降温冷敷头带贴牌加工 水凝胶冷敷贴oem

产品名称	医用冷敷头带代加工工厂 降温冷敷头带贴牌加工 水凝胶冷敷贴oem
公司名称	山东皇圣堂药业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:皇圣堂 规格:规格订制 产地:山东
公司地址	山东省济南市市中区普利绿地中心
联系电话	053182023116 15665867330

产品详情

医用冷敷头带用途

物理降温：

冷敷后局部血管收缩，继之扩张，将热量传导，起到散热的作用，有效防止高热对脑细胞的损伤！迅速消除发热、中暑等不适感。

消肿：

冷敷使血管收缩，有效阻断挫伤血管血液渗入周围组织，待冷敷停止后，受损部分机体已进行了修补及产生凝血，减轻局部发青及肿胀。

其它用途：

改善用脑过度引起的头晕眼花，偏头痛、神经衰弱、失眠等不适感，适用于中、小学生学习、考试时降温防暑、醒脑提神，是医院和家庭必备的医疗保健用品。

医用冷敷头带使用说明

置于冰箱冷藏室预冷温度3 ~5 ，需预冷时间12小时

置于冰箱冷冻室预冷温度-10 ~-20 ，需预冷时间15分钟以上

预冷完毕，取出放入棉布套中使用，可保冷1~2小时

注意：6岁以下儿童，需在成人陪同指导下使用

医用冷敷头带注意事项

使用咨询医生或遵医嘱，用前先消毒。

为防止温度过低冻伤，请用棉布套包裹使用。

婴儿等无法表达自己意愿的人群使用，注意经常检查使用情况，防止冻伤。

本产品只适合外用，如不慎破损，内液沾及眼睛或皮肤，清水冲洗即可。

置于阴凉干燥处或冰箱冷藏,防止紫外线照射。

医用冷敷贴厂家贴牌代工优势：

琼森医用冷敷头带由冰袋和尼龙布料、固定带组成，冰袋内装有冷敷凝胶。同时精选优质防水尼龙布料，对人体无毒无害。便于清洁，可水洗。内置液态凝胶，含量多，降温效果更快。医用冷敷头带超长尺寸设计，成人小孩皆可使用。可调节的魔术贴设计，可适应不同大小的头围。