

铝合金输液轨道A医用铝合金输液轨道A铝合金输液轨道厂家

产品名称	铝合金输液轨道A医用铝合金输液轨道A铝合金输液轨道厂家
公司名称	河北凯茂塑料制品有限公司
价格	8.00/根
规格参数	品牌:鑫凯茂 型号:U型 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县党校南200米
联系电话	18231860778 18231860778

产品详情

形状：直型，L型，U型，O型等，特殊形状可订做

材质：铝合金型材 颜色：铝合金本色/白色烤漆规格：壁厚1.2mm，1.4mm，1.5mm！滑轮：静音滑轮/带刹车滑轮，结构紧凑合理，滑动轻巧顺畅，采用独特加工工艺，真正实现静音、无尘、耐磨。产品特点：1、轨道采用独特工艺，弯曲弧度一次加工成型，使整套轨道浑然一体，极大增加了轨道的强度，在运输、安装过程中不变形，使用时滑动顺畅，承重安全。2、轨道氧化处理，不生锈，收拉轻巧流畅，安全稳固。3、材质环保，不沾尘，保证整体环境干净卫生。三、应用场所：医院、门诊室，诊疗室、养老院等。

铝合金输液轨道滑车

滑车可在轨道上任意移动，当吊杆承重时，滑车会固定吊杆的位置；

滑车结构紧凑合理，减小拐弯半径，滑动灵活、顺畅；

滑车轮采用独特加工工艺，应用高科技纳米材料，国内首次真正实现静音、无尘、耐磨；

滑车形状会随着轨道弧形自动调整，保证在环型轨道上也可灵活滑动。

铝合金输液轨道安装方法

1、首先确定输液天轨的安装位置，一般安装在病床中央的天花板上。需注意避开灯风扇，手术室安装时应注意避开吊塔和无影灯。

2、测量所购天轨输液架的轨道安装孔孔距，用 8冲击钻头在天花板上钻出深度大于50毫米的孔，打入 8塑料膨胀（注意塑料膨胀打入后应与天花板平齐）。

- 3、将滑车装入轨道内，用M4 × 10自攻螺钉将塑料封头安装轨道两端（O型轨无堵头，其接头处应平整对齐，保证滑车能在轨道内自由滑动）。然后用M4 × 30平头自攻螺钉将轨道安装在天花板上。
- 4、安装完毕后，将吊杆挂在吊车挂钩上，检查其运转及其他性能。