

输液轨道A安丘医院输液轨道A铝合金输液轨道批发

产品名称	输液轨道A安丘医院输液轨道A铝合金输液轨道批发
公司名称	衡水广泰新型建材有限公司
价格	7.00/米
规格参数	品牌:鑫凯茂 规格:30/32/35 厚度:1.2/1.4/1.6
公司地址	河北省衡水市景县杜桥镇宋名扬
联系电话	0166-31812078 16631812078

产品详情

输液轨道A安丘医院输液轨道A铝合金输液轨道批发

输液轨道的规格介绍：

30*20*1.2mm/32*26*1.4mm/35*23*1.5mm,轨道常用的尺寸是直型1.5米或者1.8米，U型的尺寸为1.8*0.8*1.8米，O型的尺寸为1.8*0.8*1.8*0.8米！如客户有特殊要求，可根据您提供的尺寸图定制！

输液轨道的材质：

我公司生产的输液轨道由优质的铝合金材质一体加工而成，表面的处理工艺为氧化材质（颜色就是铝合金本色），烤漆材质（白色），两种材质都是永不生锈的，使用年限久，免除医院的后顾之忧！

输液轨道的发货： 输液轨道A安丘医院输液轨道A铝合金输液轨道批发

由于成品多半属于异形，较重，所以基本采用的是物流的发货方式，我公司有经常合作的物流，物流的费用比较相对会有优惠，可降低客户的成本！

输液轨道的安装方法：

1、首先确定输液轨道的安装位置,一般安装在病床中央的天花板上.需注意避开灯风扇,手术室安装时应注意避开吊塔和无影灯.2、测量所购输液轨道架的轨道安装孔孔距,用 8冲击钻头在天花板上钻出深度大于50毫米的孔,打入 8塑料膨胀(注意塑料膨胀打入后应与天花板平齐).

3、将滑车装入轨道内,用M4×10自攻螺钉将塑料封头安装轨道两端(O型轨无堵头,其接头处应平整对齐,保证滑车能在轨道内自由滑动).然后用M4×30平头自攻螺钉将轨道安装在天花板上.4、安装完毕后,将吊杆挂在吊车挂钩上,检查其运转及其他性能.产品注意事项:1、本品为输液专用器械,使用时切忌用力猛拉、

吊挂其它物品或儿童将其当秋千晃动;2、每年应定时检查输液轨道架的安装牢固性、可靠性;3、本产品使用环境应为相对湿度不大于90%,温度在-40 ~50 ,无腐蚀性气体环境中.4、应定时清洁吊杆、吊勾、滑车,确保其随时处于清洁卫生状态.

输液轨道A安丘医院输液轨道A铝合金输液轨道批发