

模拟人、假人、高级婴儿复苏模拟人、教学培训假人

产品名称	模拟人、假人、高级婴儿复苏模拟人、教学培训假人
公司名称	上海亚迈森医疗科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:EM-008 品牌:EMSS 种类:模拟假人、急救产品、医疗设备
公司地址	中国 上海市徐汇区 中山南二路777弄2号楼501室
联系电话	86 21 61020118 13310061136

产品详情

型号	EM-008	品牌	EMSS
种类	模拟假人、急救产品、医疗设备		

产品名称：高级婴儿复苏模拟人

产品型号：em-008

产品介绍:

该产品采用美国心脏学会(aha)2005国际心肺复苏(cpr)&心血管急救(ecc)指南标准，率先开发出专门针对社会

心肺复苏普及与医学院校、医疗卫生系统培训使用的经济型第六代新产品，其造型更完美、功能更强大、操作更方便的领

先产品。

执行标准：美国心脏学会(aha)2005国际心肺复苏(cpr)&心血管急救(ecc)指南标准

主要功能：

模拟标准气道开放，人工手指位胸外按压显示报警。

按压位置正确、错误的指示灯显示及错误的报警。

按压强度正确（1-2cm区域）、错误（ $< 1-2\text{cm} <$ 区域）的指示灯显示及错误的报警。

人工口对口呼吸（吹气）显示报警。

吹入的潮气量 $< 30\text{ml}-50\text{ml} <$ 指示灯显示及报警；吹入的潮气量在30ml-50ml之间。

正确指示灯显示；吹入潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。

按压与人工呼吸比：30：2/单人比或15：2/双人。

操作周期：2次有效人工吹气，再按压情形人工吹气30：2或15：2五个循环周期cpr操作。

操作频率：最新国际标准：100次/分；操作方式：训练操作。

检查肱动脉反应：手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动；

工作状态：

采用220v电源，经过稳压器稳压输出电源6v，或采用4节1号电池的直流电源状态下工作，适应野外无电源地方训练。

标准套配置：

高级复苏婴儿人体模型一具

电子显示器一台

复苏操作垫一条

屏障面膜(50张/盒)一盒

可换肺囊装置五套；

使用手册一本。