

平板电脑心肺复苏模拟人（无线版）

产品名称	平板电脑心肺复苏模拟人（无线版）
公司名称	上海知能医学模型设备制造有限公司
价格	20000.00/套
规格参数	品牌:医博 型号:BIX/CPR15730 生产厂家:知能医学模型
公司地址	松江区昆港公路1268号
联系电话	021-63818866 18116401121

产品详情

执行标准：

美国心脏学会（AHA）2015国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准功能特点：

模拟人与平板电脑无线连接。 模拟生命体征：1) 初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。

2) 按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。

3) 抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。 可进行标准气道开放。

可进行人工手位胸外按压和人工呼吸。 三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核。

1) 方式一：CPR训练，在设定的时间范围内，可进行按压和吹气。 2) 方式二：模式考核，在设定的时间范围内，根据2015国际心肺复苏标准，按压和吹气30：2的比例，完成5个循环操作。 3) 方式三：实战考核，在设定的时间范围内，根据2015年国际心肺复苏标准，按压和吹气30：2的比例，完成5个循环操作。

评分系统：可对学员的成绩进行评分。CPR显示屏功能：

电子监测：电子监测气道开放和按压部位，显示人工呼吸和心外按压的正确次数和错误次数。

语音提示：全程中文语音提示，可调节音量。

条形码显示吹气量：正确的吹气量为500/600ml-1000ml。 1) 吹气量过少时，条形码为黄色。

2) 吹气量合适时，条形码为绿色。 3) 吹气量过大时，条形码为红色。

条形码显示按压深度，正确的按压尝试5cm以上。 1) 按压深度过少时，条形码为黄色。

2) 按压尝试深度合适时，条形码为绿色。 可设定操作时间。

电源状态：内置锂电池，配套充电器打印机功能： 可选择操作结束后打印操作过程。 成绩单内容涵盖操作方式，每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误和次数、吹气错误的原因和次数、设定时间、操作时间和成绩评定。标准套配置：

心肺复苏模拟人一具； 平板电脑； 豪华手拉推式人体硬塑箱一只； 复苏操作垫一条；

一次性消毒面膜(50张/盒)一盒； 可更换面皮一只； 可换肺气袋五个； 产品保修卡、产品合格证

、使用说明书、急救操作手册一套。-----

友情

提示：如

果以上产品不符合

您的需求，专业的产品经理根据您的具体需求针对性推荐适合您的心肺复苏模拟人产品。