

自动电脑心肺复苏模拟人

产品名称	自动电脑心肺复苏模拟人
公司名称	上海知能医学模型设备制造有限公司
价格	25000.00/套
规格参数	品牌:医博 型号:BIX/CPR15690 生产厂家:知能医学模型
公司地址	松江区昆港公路1268号
联系电话	021-63818866 18116401121

产品详情

知能医学模型自动电脑心肺复苏模拟人 BIX/CPR15690

本款产品是知能医学模型

根据自身20多年心肺复苏模拟人专业研发制造经验，而设计研发的新一代心肺复苏模拟人产品，采用全液晶屏显示，并重点突出了心肺复苏（CPR）训练操作时的语音辅助功能，使用者可以自行设定各项考核数值，以便更加符合医学临床和教学练习时对心肺复苏（CPR）的操作要求。执行标准：美国心脏学会（AHA）2015国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准功能特点：

采用8英寸彩屏显示：CPR操作动画显示，柱状曲线显示

模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。 模拟生命体征：

急救成功后瞳孔从散大自动变为缩小，颈动脉回复跳动；

可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。

三种操作方式：可进行CPR训练、模式考核和实战考核。 电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。

语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。

文字提示：训练和考核中全程中文文字提示。 吹气报警显示：通过黄、绿、红三种颜色显示吹气量大小；中文语音提示；液晶计数显示；吹入的潮气量过快或超大，指示灯报警显示；

按压报警显示：通过黄、绿、红三种颜色显示吹气量大小；中文语音提示；液晶计数显示；

可自行设定操作时间，以秒为单位。

间断操作失败功能：按照2015年心肺复苏操作标准，连续8秒不操作显示急救失败；

操作频率：100-120次/分。 电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳压后输出电源12V。（可选加装锂电池，适用于无外接电源的情况下直接使用）。 触觉感应：模拟人自带触觉感应系统：“意识判别”和“脉搏判别”事件可在模拟人身上实现真实操作，并自动记录于整个急救操作流程种。“意识判别”为拍拍肩膀，“脉搏判别”为按压颈动脉检测脉搏。显示屏上实时显示该两项操作。计入成绩打印当中。

打印机功能：操作结束后打印操作过程。

参数设置功能：可以进行按压深度、吹气量、循环操作比进行修改设置。 RF遥控器功能：

包含以下三大板块功能急救事件：包括意识判别、急救呼叫、按脉检测、感测呼吸、清除异物5个按键，代表急救过程中相应事件的输入，在学员操作过程中，可表示学员进行此项操作。操作按键：为功能

控制按键，例如：开始按键、返回、打印，同模拟人控制器面板上相应按键功能一样。控制模拟人各项急救操作。模拟人控制：可在任何时间控制模拟人的状态。Eye控制模拟人瞳孔显示状态，在正常与放大间互相切换。Hand控制模拟人脉搏状态，在脉搏有无间切换。成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压与吹气比例、循环次数、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。材料特点：面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形，拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。-----

友情

提示：如

果以上产品不符合

您的需求，专业的产品经理根据您的具体需求针对性推荐适合您的心肺复苏模拟人产品。