

# 手术室液体保温箱/医用恒温箱/盐水加热箱

产品名称	手术室液体保温箱/医用恒温箱/盐水加热箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 常用型号:FYL-YS-430L 高配型号:FYL-YS-431L
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

手术室液体保温箱/医用液体保温箱/盐水加热箱介绍北京福意联有限公司 ( Beijing Electric Applian Co., Ltd. ) 具有自行、设计、经营的能力, 经营的仪器设备均被广泛应用于医疗、实验室、钢铁、冶金、铸造、机械、建筑、质检、大、院校、化工等领域。产品优良各地, 远销, 深受广大用户的好评和青睐。福意联 ( FU.YI.LIAN ) 9001:2008质量管理, 14001:2004环境管理,

手术室液体保温箱/医用液体保温箱/盐水加热箱参数:

- 型号: FYL-YS-50L 温度: 4 ~ 38 外型尺寸: 430 × 480 × 510毫米
- 型号: FYL-YS-100L 温度: 4 ~ 38 外型尺寸: 480 × 490 × 840毫米
- 型号: FYL-YS-138L 温度: 4 ~ 38 外型尺寸: 540 × 550 × 840毫米
- 型号: FYL-YS-150L 温度: 2 ~ 48 外型尺寸: 595 × 570 × 865毫米
- 型号: FYL-YS-230L 温度: 2 ~ 48 外型尺寸: 595 × 590 × 1215毫米
- 型号: FYL-YS-280L 温度: 2 ~ 48 外型尺寸: 595 × 570 × 1445毫米
- 型号: FYL-YS-310L 温度: 2 ~ 48 外型尺寸: 595 × 695 × 1315毫米
- 型号: FYL-YS-430L 温度: 2 ~ 48 外型尺寸: 595 × 680 × 1805毫米

型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×860毫米

型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440毫米

型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795毫米

型号：FYL-YS-828L 温度：2~48 外型尺寸：1265×680×1830毫米

型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48 外型尺寸：1265×680×2150毫米

手术室液体保温箱/医用液体保温箱/盐水加热箱与用途：

手术室液体保温箱/医用液体保温箱/盐水加热箱采用PTC加温。福意联致力于医用加温箱，十年经验积累，打造优良的加温设备。本产品适可加温液体、冲洗液、造影剂、化学试剂、透析液、B超液等。手术室液体保温箱/医用液体保温箱/盐水加热箱用于液体，生理盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。

手术室液体保温箱/医用液体保温箱/盐水加热箱适用范围：

主要用于、手术室、门诊、急救、放射科，内科，库等。用于解决手术室及药剂科等科室的液体37度加温和保温。如：透析液,冲洗液 生理盐水等。

手术室液体保温箱/医用液体保温箱/盐水加热箱特点介绍：

主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露

电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和锁功能，防止出现意外。

优良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。

制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

手术室液体保温箱/医用液体保温箱/盐水加热箱注意事项：

定用清扫压缩机和冷凝器

压缩机和冷凝器是恒温箱的重要制冷部件，如果沾上灰尘会影响散热，导致零件使用寿命缩短、恒温箱制冷效果减弱。以，要定期检查它们是否脏了，脏了就要清扫。因为挂背式恒温箱的冷凝器、压缩机都裸露在外面，易沾上灰尘、蜘蛛网等。

## 定用清洁恒温箱内部

恒温箱使用时间长了，恒温箱内的气味会很难闻，甚会滋生细菌，影响食品原味，以，恒温箱使用一段时间后，要把恒温箱内的食物拿出来，替恒温箱大搞卫生。

在清洁时有几条注意事项：

- 1、应定期对恒温箱进行清洁（每年少2次）。清洁恒温箱时先切断电源，用软布蘸上清水或食具清洁剂，轻轻擦洗，然后蘸清水将洗洁精试去。
- 2、为防止损害箱外涂复层和箱内塑料零件，请勿用洗衣粉、去污粉、滑石粉、碱性洗涤剂、天那水、开水、油类、刷子等清洗恒温箱。
- 3、箱内附件肮脏积垢时，应拆下用清水或洗洁精清洗。电气零件表面应用干布擦拭。
- 4、清洁完毕，将电源插头牢牢插好，检查温度控制器是否设定在正确位置。
- 5、恒温箱长时间不使用时，应拔下电源插头，将箱内擦拭干净，待箱内充分干燥后将箱门关好。

承诺：

1. 工程师将向您提供7×24小时的无假日服务
2. 设备安装承诺：有设备将于合同约定的时间内到货，工程师将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。
3. 设备保修承诺：设备到货一个月内请验货安装并正式启用，将同时开始计算保修期，免费保修期为一年，压缩机三年，PTC加热模块三年。若因客户原因延迟安装，到货后一个月将开始计算保修期，在保修期内每年提供免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。
4. 保外承诺：设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有服务采用保修。
5. 优良服务：北京福意联设有门的应用工程师，向客户提供实验室及生物域的应用优良服务，对于与北京福意联的产品相关的应用问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。