

老人防抓约束手套

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 老人防抓约束手套 |
| 公司名称 | 安平县康博医疗器械有限公司 |
| 价格 | 15.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:康隆达 型号:加工定做 产地:河北省安平县 |
| 公司地址 | 河北省衡水市安平县 |
| 联系电话 | 0318-8091006 15127820006 |

产品详情

老人防抓约束手套临床使用现状及思考：

目前，医护人员将约束视为无定向感及意识混乱的患者，为了确保其的好方法。事实上，有研究证实约束并不能减少意外事件，如跌倒、压疮、自拔管道等的发生，反而使患者出现受伤、功能减退、失禁、肌肉耗损、认知降低、情绪障碍、混乱不安、且会增加患者的发病率及死亡率等负面的生理及心理症状及征候。可见约束并非维护患者的手段，而无约束的照护则是医护人员应努力的目标。

何为老人防抓约束手套：

约束手套，材质多采用棉质布料/透气网布、塑胶板、粘合魔术贴、字母扣、长绑带等制成，设计合理，形似手套，符合人体生理特点，穿戴方便，美观大方，手部拇指与四肢分开，一般有开口封口设计两种，方便观察手指用的。腕部一般为有保护软垫的固定部位，分别加上有魔术贴、子母扣、长绑带用来固定到床上或者坐椅上面。

老人防抓约束手套作用：

内置防抓板带拉链开口的乒乓球拍式约束手套专门为身体有留置管道、有拔管风险、需肢体约束的患者，主要用于防止抓脱管道，体现人性化护理服务。约束手套的应用有效阻止了患者拔脱各种管道，即减少了反复插管给患者带来的痛苦，无任何并发症。也减轻了医护人员的工作量，病家及医护人员满意度得到提高。可视，可随时查看患者手部情况和液体情况，在约束的同时可输液，具有可调节功能，还可以防止肌张力高或长期用力握拳时手中无物，产生的皮肤损害。

老人防抓约束手套使用方法：

1.首先评估手部皮肤情况：是否完整、破损、水肿；

- 2.先打开魔术贴，将手轻轻放入，手心贴向基板，拇指与其余四个手指分别放入相应位置；
- 3.按手腕大小贴上魔术贴，松紧度以放一手指为准，手指可适当活动，腕部、肘部没有受限；
- 4.对高风险拔管患者可启用备用约束带将患者上肢适当固定在手部附近的床沿；
- 5.使用前检查各部位是否牢固，依据病人的病情需要进行佩戴，病人佩戴时如出现局部不适，予适当调整；
- 6.魔术贴不应系拴过紧，应确保魔术贴与手腕部之间留有一只手指的空间。少每两小时解下护套，检查血液循环及皮肤状况，并留意异常情况。

老人防抓约束手套注意事项：

- 1.请勿将本产品放置于温度在50度以上的环境中。
- 2.严格避免与锋利、尖锐的物体及腐蚀性溶液接触。
- 3.为避免交叉感染，手部固定套不可在病人间交叉使用，并定期对手部固定套进行清洗和消毒。
- 4.使用前检查手部固定套各个部位是否牢固，有无破损等。

老人防抓约束手套清洗方法：

约束手套（手部固定套）的清洗方法非常简单，你只需要一块肥皂，仔细清洗，晾干后备用。注意事项：千万不能使用含氯消毒水，含氯消毒水会导致约束手套（手部固定套）轻微断裂，从而导致产品不能使用。

企业能力文化展示：

1我们质量为本

公司库房面积1000平米

生产车间500平米

年生产能力50000件

2我们服务为本

有技术人才、研发团队、销售团队、售后服务团队及全国各地市级代理商

爱岗敬业，诚实守信

耐心到位，服务至上

充分理解客人的需求、过错、抱怨、投诉

3诚信经营

子曰:人而无信不知其可也，大车无輹，小车无𨋖其何以行之哉。

4我们团结奋进

经过几年的磨练已经具有成熟的制作工艺以及优良的研发、设计制作团队

我们发愤忘食，乐以忘忧，不知老之将至云尔

我们不义而富且贵，于我如浮云

我们信仰儒家理想，践行孝悌忠信礼义廉耻八德，先做人，在踏踏实实做企业，做产品。

我们传播社会主义核心价值观，弘扬中国传统文化

我们脚踏实地少谈些主义，多干点实事儿，空谈误国，实干兴邦

我们为中华民族的伟大复兴贡献绵薄之力