

输液轨道如何安装A天轨输液轨道A输液轨道价格

产品名称	输液轨道如何安装A天轨输液轨道A输液轨道价格
公司名称	河北凯茂塑料制品有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:鑫凯茂 型号:U型 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县党校南200米
联系电话	18231860778 18231860778

产品详情

输液轨道如何安装A天轨输液轨道A输液轨道价格

材质：铝合金（输液轨道截面规格型号齐全）

轨道整体规格：1.8*0.8*1.8

- 1、天轨输液轨道有直轨、U型轨、O型轨，也可特制各种异型轨道。
- 2、O型轨道采用独特工艺一次加工成型，只有一个结合口，并有强化PVC专用连接件，使整套轨道浑然一体，极大增加了轨道的刚度。在运输、安装过程中不变形，使用时滑动顺畅，承重安

输液轨道厂家输液架U轨介绍

轨道：铝合金材质，白色亚光色泽，有I型、U型、O型、L型、

截面：30mm*20mm*1.2mm/

U型规格：1800mm*800mm(长度按照客户要求订做)

I型规格：1500mm/1800mm/2000mm/2600mm(长度按照客户要求订做)

适用范围：

安装于医院、养老院、福利院等的医疗设施。

天轨输液轨道产品特点：

- 1、天轨输液轨道有O型、L型、U型、直型，也可特制各种异型轨道。
- 2、在运输、安装过程中不变形，使用时滑动顺畅，承重安全。
- 3、我们的安装采用塑料胀塞加木螺丝。
- 4、市场上的塑料胀塞太杂，安全性没有保障。我们自己开模具，制作加厚、材质优良、韧性好的塑料胀塞。100%保证了使用安全。

天轨输液轨道滑车：

滑车可在轨道上任意移动，当吊杆承重时，滑车会固定吊杆的位置；

滑车结构紧凑合理，减小拐弯半径，滑动灵活、顺畅；

滑车轮采用独特加工工艺，应用高科技纳米材料，国内首次真正实现静音、无尘、耐磨；

滑车形状会随着轨道弧形自动调整，保证在环型轨道上也可灵活滑动。

天轨输液轨道安装方法：

- 1、首先确定输液天轨的安装位置，一般安装在病床中央的天花板上。需注意避开灯风扇，手术室安装时应注意避开吊塔和无影灯。
- 2、测量所购天轨输液架的轨道安装孔孔距，用 8冲击钻头在天花板上钻出深度大于50毫米的孔，打入 8塑料膨胀（注意塑料膨胀打入后应与天花板平齐）。