

雾化器医用超声波微网静音雾化儿童成人婴儿家用便携式手持雾化机

产品名称	雾化器医用超声波微网静音雾化儿童成人婴儿家用便携式手持雾化机
公司名称	成都恩普生医疗科技有限公司
价格	168.00/台
规格参数	货号：:NBM-1 出雾口数：:1 电源方式：:USB,干电池
公司地址	高新区(西区)合作路333号
联系电话	028-61837871 18683716555

产品详情

雾化器使用方法：

将导管一头接在雾化器出口，一头接在雾化杯底部，然后在雾化杯中倒进雾化药液（建议在2~8ml以内）

，在佩戴上面罩或咬上咬嘴即可进行雾化。

需要注意的是：

- 1、雾化时用水或纯净水是不合适的，如需稀释药物应使用生理盐水；
- 2、每套雾化套件不可多人使用，避免交叉感染；
- 3、一般使用下，雾化器过滤棉应每个一两个月换一次，以保证雾化空气的质量。

雾化器的优点：

- 1、操作使用更方便，产品备有2米气管一根，活动余地大，坐、躺都能用，雾化组件轻巧，佩戴、手扶方便；
- 2、纯机械性产品，故障率极低，维修费用低，使用寿命长，一般正常使用5~10年；
- 3、雾化使用原药雾化，在相对的治疗时间内吸入的雾化量适宜，不易造成气管内壁粘膜发涨，造成气管堵塞，雾化的颗粒超细，并且不易碰撞结合，人体吸入舒适，而且能进入支气管、肺部等气管，临床效果极佳，特适宜下呼吸道疾病治疗；
- 4、高效无油活塞式压缩机，雾化时不需冷却水、日常免维护、操作更简单方便；原药雾化，不需稀释，临床效果好；几乎没有药物残留量，药物利用率高。