

医用弹性胸带

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 医用弹性胸带 |
| 公司名称 | 安平县康博医疗器械有限公司 |
| 价格 | 20.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:康隆达 型号:加工定做 产地:河北省安平县 |
| 公司地址 | 河北省衡水市安平县 |
| 联系电话 | 0318-8091006 15127820006 |

产品详情

医用弹性胸带定义：

医用弹性胸带就是临床上普遍使用的胸部固定带，用于胸科手术或外伤造成肋骨断裂需要对胸部固定，保持胸廓完整性以及防止反常呼吸，防止胸部运动所致的肋骨愈合不良，促进肋骨断端快速愈合，使用方便，工艺简单，用后可大大减轻医护人员劳动强度，减少患者的痛苦，提高水平，以满足胸腔术后的使用要求。

医用弹性胸带分类：

医用胸带可分为弹力胸带和棉布胸带两种。主要是材质不同，功能相同。

医用弹力胸带适用范围：

肋骨骨折后固定；

开胸手术后绑扎固定；

用于肺及食管等胸部手术后；

固定胸廓，限制肋骨断端活动，减轻疼痛。

医用弹性胸带使用方法：

准备胸带携至患者床旁，向患者及家属解释操作的目的、意义、方法；

胸带比腹带多两个带脚，包扎前先将胸带平放于患者背后，展开两侧带脚；多出的两个带脚放于患者颈部的两侧，将其中一侧的带脚自下而下放于同侧胸前；

两侧的带脚按腹带包扎法进行包扎；

最后将多出的两个带脚绕到胸前进行打结包扎。

医用弹性胸带使用注意事项：

- 1.注意胸带固定的松紧度，以患者能耐受为宜。
- 2.过松时应重新固定胸带。
- 3.出汗多时应及时松开胸带，擦洗背部及胸部皮肤，并更换胸带。