

# 医疗胸带生产厂家

产品名称	医疗胸带生产厂家
公司名称	安平县康博医疗器械有限公司
价格	20.00/件
规格参数	品牌:康隆达 型号:加工定做 产地:河北省安平县
公司地址	河北省衡水市安平县
联系电话	0318-8091006 15127820006

## 产品详情

医疗胸带企业能力文化展示

1我们质量为本

公司库房面积1000平米

生产车间500平米

年生产能力50000件

2我们服务为本

有技术人才、研发团队、销售团队、售后服务团队及全国各地市级代理商

爱岗敬业，诚实守信

耐心到位，服务至上

充分理解客人的需求、过错、抱怨、投诉

3诚信经营

子曰:人而无信不知其可也，大车无輹，小车无樾其何以行之哉。

4我们团结奋进

经过几年的磨练已经具有成熟的制作工艺以及优良的研发、设计制作团队

我们发愤忘食，乐以忘忧，不知老之将至云尔

我们不义而富且贵，于我如浮云

我们信仰儒家理想，践行孝悌忠信礼义廉耻八德，先做人，在踏踏实实做企业，做产品。

我们传播社会主义核心价值观，弘扬中国传统文化

我们脚踏实地少谈些主义，多干点实事儿，空谈误国，实干兴邦

我们为中华民族的伟大复兴贡献力量

医疗胸带定义：

医用弹性胸带就是临床上普遍使用的胸部固定带，用于胸科手术或外伤造成肋骨断裂需要对胸部固定，保持胸廓完整性以及防止反常呼吸，防止胸部运动所致的肋骨愈合不良，促进肋骨断端快速愈合，使用方便，工艺简单，用后可大大减轻医护人员劳动强度，减少患者的痛苦，提高水平，以满足胸腔术后的使用要求。

医疗胸带分类：

医用胸带可分为弹力胸带和棉布胸带两种。主要是材质不同，功能相同。

医用弹力胸带适用范围：

肋骨骨折后固定；

开胸手术后绑扎固定；

用于肺及食管等胸部手术后；

固定胸廓，限制肋骨断端活动，减轻疼痛。

医疗胸带使用注意事项：

- 1.注意胸带固定的松紧度，以患者能耐受为宜。
- 2.过松时应重新固定胸带。
- 3.出汗多时应及时松开胸带，擦洗背部及胸部皮肤，并更换胸带。

医疗胸带使用方法：

准备胸带携至患者床旁，向患者及家属解释操作的目的、意义、方法；

胸带比腹带多两个带脚，包扎前先将胸带平放于患者背后，展

开两侧带脚；多出的两个带脚放于患者颈部的两侧，将其中一侧的带脚自下而下放于同侧胸前；

两侧的带脚按腹带包扎法进行包扎；

最后将多出的两个带脚绕到胸前进行打结包扎。