

高温平面灭菌指示包装袋

产品名称	高温平面灭菌指示包装袋
公司名称	河北九冶医疗科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省辛集市兴华路南段11号宴乐园商业中心七楼709室
联系电话	13703299856

产品详情

本品采用聚丙烯和聚酯多层复合膜及医用透析纸经热压而成的一次性医用品最终灭菌包装材料。通过指示油墨的颜色变化能指示灭菌过程。包装袋上印有两种指示剂油墨，在压力汽灭菌条件下，一种指示油墨由蓝色变为黑灰色；在环氧乙烷灭菌条件下，另一种指示油墨由红色变为黄色。

使用范围：

可用于包装往复循环使用的医疗器械进行压力蒸汽灭菌或环氧乙烷灭菌。

使用方法：

将清洁、干燥的物品放入包装袋内，（灭菌物品不应超过灭菌袋长度的3 / 4,这样才能保证足够的封合,否则灭菌袋爆裂的可能性会增加）。

尖锐器械的摆放方向应与剥离方向相反（确保剥离安全）。

用热封机封口，热封温度需使用者根据所采用的封口机型号自行验证。

按照要求纸塑相邻放入蒸汽灭菌设备或环氧乙烷灭菌设备内,按常规方式进行灭菌。

确认灭菌过程指示标识的变色情况：蒸气灭菌前为粉红色,灭菌后呈棕色；环氧乙烷灭菌前为蓝色,灭菌后呈黄色。

将灭菌完好的灭菌袋置于干燥、避光和清洁区储存、待用。

需要使用时,按剥离指示方向剥开灭菌指示袋取出物品即可。

对包装的灭菌产品进行搬运、运输和保存必须按照卫生标准要求进行。

经常规蒸汽灭菌或环氧乙烷灭菌的在6个月内使用。