

奉节医院医用输液轨道 L形U形直型医用帘轨道

产品名称	奉节医院医用输液轨道 L形U形直型医用帘轨道
公司名称	景县鑫凯茂建筑防护建材商行
价格	7.00/米
规格参数	河北凯茂:鑫凯茂 30轨:30*20*1.2mm 河北:景县
公司地址	景县党校东侧
联系电话	15732837257

产品详情

产品特点：1、天轨输液轨道有O型、L型、U型、直型，也可特制各种异型轨道。2、在运输、安装过程中不变形，使用时滑动顺畅，承重安全。3、我们的安装不采用射钉枪等临时敷衍方式，而塑料胀塞加木螺丝。4、市场上的塑料胀塞太杂，安全性没有保障。我们自己开模具，制作加厚、材质优良、韧性好的塑料胀塞。100%保证了使用安全。滑车：滑车可在轨道上任意移动，当吊杆承重时，滑车会固定吊杆的位置；滑车结构紧凑合理，减小拐弯半径，滑动灵活、顺畅；滑车轮采用独特加工工艺，应用高科技纳米材料，国内首次真正实现静音、无尘、耐磨；滑车形状会随着轨道弧形自动调整，保证在环型轨道上也可灵活滑动。安装方法：1、首先确定输液天轨的安装位置，一般安装在病床中央的天花板上。需注意避开灯风扇，手术室安装时应注意避开吊塔和无影灯。2、测量所购天轨输液架的轨道安装孔孔距，用 8冲击钻头在天花板上钻出深度大于 50毫米的孔，打入 8塑料膨胀（注意塑料膨胀打入后应与天花板平齐）。3、将滑车装入轨道内，用M4×10自攻螺钉将塑料封头安装轨道两端（O型轨无堵头，其接头处应平整对齐，保证滑车能在轨道内自由滑动）。然后用M4×30平头自攻螺钉将轨道安装在天花板上。4、安装完毕后，将吊杆挂在吊车挂钩上，检查其运转及其他性能。

