

# 供应皮牵引带

产品名称	供应皮牵引带
公司名称	安平县康博医疗器械有限公司
价格	30.00/件
规格参数	品牌:康隆达 型号:加工定制 产地:河北省安平县
公司地址	河北省衡水市安平县
联系电话	0318-8091006 15127820006

## 产品详情

皮牵引带简介：

皮牵引是骨科常见的保守治疗方法之一，它是利用肌肉在骨骼上的附着点，将牵引力传递到骨骼，使骨折复位、固定，促其愈合。但如病人需要长期牵引或牵引重量较大时，踝部及足跟处受力较大，病人的踝部及足跟皮肤常会出现破损或牵引无效。为了减轻病人的痛苦，保持皮肤完整性，皮牵引带的使用，减轻了牵引后不良反应。

皮牵引带的作用:

使骨折复位，尤其是矫正骨折短缩移位。通过调整牵引角度，也可矫正成角和旋转移位；

稳定骨折断端，有止痛和便于骨折愈合的作用；

使患肢相对固定，防止病理性骨折；

使脱位的关节复位，并可防止再脱位；

患肢制动，减少局部刺激，减小了局部炎症扩散；

保持肢体功能位，便于关节活动，防止肌肉萎缩；

解除肌肉痉挛，改善静脉血液回流，消除肢体肿胀；

矫正和预防关节屈曲挛缩畸形；

## 皮牵引带使用方法：

将皮牵引带放置患肢旁边；助手一手紧握住肢体远端，一手放置膝下，沿纵轴方向牵引患肢；另一人将皮牵引带放置患肢下方，上面垫毛巾（平整、均匀）保护皮肤；轻轻放下患肢；牵引带下方置于踝关节上2厘米；先包小腿两侧牵引带正对内外踝，再包裹大腿；患肢下方放软枕；连接牵引绳反牵引力量牵引；保持有效牵引，患肢呈中立位，下肢与牵引绳保持同一条轴，牵引沙包悬吊。