

# 供应床头牵引架

产品名称	供应床头牵引架
公司名称	安平县康博医疗器械有限公司
价格	260.00/件
规格参数	品牌:康隆达 型号:加工定做 产地:河北省安平县
公司地址	河北省衡水市安平县
联系电话	0318-8091006 15127820006

## 产品详情

### 床头牵引架概述：

牵引在骨科中是一个必不可少的治疗手段。据统计,创伤骨科患者的牵引率达80%。包括最常见的颅骨牵引、颌枕带牵引及四肢的骨牵引。床头牵引架主要部件采用不锈钢304材料制造。牵引重锤采用铸铁材料制造。该产品适用于骨科手术中对四肢骨折进行牵引复位用的手术器械。

### 床头牵引架优势：

本多功能床头牵引架充分利用机械力学原理,不但力学上有足够的支撑能力,而且在高度及方向调节上有强大的调节能力,能满足骨科各种常见牵引的需要,能充分发挥牵引的作用,对临床的治疗起着较关键的作用。而且制作成本较低,使用效率较高,适合因经济原因的基层医院使用。另外部分入住条件较好的高级医院但病情需要脱离骨科病区而又需作牵引治疗的骨科患者,也是使用本支架的对象。因而本多功能床头牵引架在临床有广泛的推广应用价值,是一种经济实用、简便、用途广泛并能满足骨科牵引需要的良好器械。

### 床头牵引架使用：

将监护床(如OPUS)的床头板卸下,调节监护床的高度,在监护床床头按常规行颅骨牵引弓的钻孔安放操作;

牵引弓安放完毕检查位置良好无误后,将本牵引支架安插于床头,将牵引绳穿过滑轮,系于颅骨牵引弓上,开始对上下和水平两个方向进行调节。

通过上述两个部位的高度调节,将滑轮调整于近乎头颅耳后线水平,然后根据颈椎屈曲或过伸位牵引的要求,再在上下方向上略作调整,完成高度上的调节。

通过水平及上下方向的不同调节,各种方向的牵引力线就可以通过支架的不同部件调节而产生了;

滑轮臂较长,牵引锤与床头间产生一定的距离,保证了牵引的有效性。