

供应颅骨牵引弓

产品名称	供应颅骨牵引弓
公司名称	安平县康博医疗器械有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:康隆达 型号:加工定做 产地:河北省安平县
公司地址	河北省衡水市安平县
联系电话	0318-8091006 15127820006

产品详情

颅骨牵引弓性能特点：

颅骨牵引弓产品是由镀钛和不锈钢材料构成，本产品是滑轮设计而成，本产品使用方便，性能稳定，使用安全，颅骨牵引弓是由内弓、外弓、拉杆、牵引钢针构成。

颅骨牵引弓主要特征在于采用内弓、外弓连接构成，它的外弓和拉杆的连接以及固定牵引针的固定子与牵引弓的连接是活轴连接。自动产生张力，而且牵引针不串针、不脱落。产品构造简单，实用起来方便、实用。

颅骨牵引弓适用范围：适合颅骨牵引的手术患者。

颅骨牵引弓使用方法：

将伤员剃去头发，仰卧位，颈部两侧用沙袋固定。

在两侧乳突之间画一条冠状线，再沿鼻尖到枕外粗隆画一条矢状线。

将颅骨牵引弓的交叉部对准两线的交点，两端钩尖放在横线上充分撑开牵引弓，钩尖在横线上的落点作钻孔定位标记。

在两标记点处进行局部麻醉后，各做一个小横切口，直至骨膜并略作剥离。钻孔时应使用特制颅骨钻头（在钻头上3mm深处有一安全环，可防止钻穿颅骨），钻头的方向与牵引弓钩尖的方向一致，与颅顶水平线成45度，仅钻入颅骨外板。钻孔后安装颅骨牵引弓，并拧紧牵引弓上的螺旋进行固定，以防松脱或向内挤紧刺入颅内。

牵引弓系结牵引绳，通过床头滑轮进行牵引。

床头抬高20cm左右，作为对抗牵引。牵引重量要根据颈椎骨折和脱位情况决定，一般为6—8kg。

如伴小关节交锁者，重量可加到12.5—15kg，同时将头稍呈屈曲位，以利复位。

如证明颈椎骨折、脱位已复位，应立即在颈部和两肩之下垫薄枕头，使头颈稍呈伸展位，同时立即减轻牵引重量，改为维持性牵引。