

# 带坐便助行器,移动马桶,铝合金助行器

产品名称	带坐便助行器,移动马桶,铝合金助行器
公司名称	中山市福仕得健身器材有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:福仕得 产地:广东中山 材质:铝合金
公司地址	中国广东中山火炬开发区丹丽路17号
联系电话	86 760 28123553 18689380045

## 产品详情

功能：铝合金材质，框式结构，带马桶，高度可调，固定式交互式两用，一键切换，可折叠

基本参数：

1、尺寸：长49CM；宽52CM；高74~92CM；折叠后尺寸：52\*10\*(74-92)CM，承重：100KG；净重：2.55KG；

2、以GB/T 14728.1-2006《双臂操作助行器要求和试验方法

第1部分：框式助行架》国家标准作为设计生产执行标准，其结构特点如下：

2.1) 主架：采用6061F高强度加粗铝合金材质，管直径为25.4mm，厚度为1.2MM，表面采用阳极氧化处理，可折叠式结构，不占空间。脚管管直径为28.6mm，厚度为1.2mm，前杆加宽加厚设计；主架高度8档可调，交互式和固定式两种使用方式，通过弹珠实现一键式的切换和折叠。

2.2) 握把：采用PVC软质握把，表面有花纹防滑性好，手感舒适，不吸汗，使用时间寿命长；采用上下两级扶手设计，增加了辅助起身的功能。

2.3) 脚垫：材质为耐用，耐磨，有弹性，表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。

2.4) 坐便：坐板采用PE吹塑板，坚固耐用。

## 1.4 使用方法及注意事项：

1.4.1使用方法：打开包装，取出产品。双手拿起主架，展开两侧扶手。安装便桶，将便桶架装到助行器上扣进侧杆内，再放入便桶，坐板和盖板。

1.4.2注意事项：使用前仔细检查各个部位，如发现低端易损件异常，请及时更换。使用前确保调节键调节到位，即听到“咔哒”一声才可使用。使用带座便功能时，只能用固定式模式，不能调到交互模式以免发生移动；切勿将产品放置在高温或者低温环境中，否则会造成橡胶件老化及弹力不足的现象。本产品应放置在干燥，通风，平稳，无腐蚀性物质的室内。每周定期检查产品是否良好。