

凯茂医用输液轨道A铝合金输液轨道A隔帘轨道输液轨道

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 凯茂医用输液轨道A铝合金输液轨道A隔帘轨道输液轨道 |
| 公司名称 | 河北凯茂塑料制品有限公司 |
| 价格 | 21.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:鑫凯茂 型号:U型 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县党校南200米 |
| 联系电话 | 18231860778 18231860778 |

产品详情

凯茂医用输液轨道A铝合金输液轨道A隔帘轨道输液轨道

医用输液轨道安装方法

- 1、首先确定输液天轨的安装位置，一般安装在病床中央的天花板上。需注意避开灯风扇，手术室安装时应注意避开吊塔和无影灯。
- 2、测量所购天轨输液架的轨道安装孔孔距，用 8冲击钻头在天花板上钻出深度大于50毫米的孔，打入 8塑料膨胀（注意塑料膨胀打入后应与天花板平齐）。
- 3、将滑车装入轨道内，用M4×10自攻螺钉将塑料封头安装轨道两端（O型轨无堵头，其接头处应平整对齐，保证滑车能在轨道内自由滑动）。然后用M4×30平头自攻螺钉将轨道安装在天花板上。
- 4、安装完毕后，将吊杆挂在吊车挂钩上，检查其运转及其他性能。

医院输液轨道U型轨道，标准规格为1.8m*0.8m，铝合金材质

直型轨道，规格根据现场实际而定，铝合金材质

椭圆型轨道，标准规格为1.8m*0.8m，铝合金材质

椭圆型轨道采用独特工艺一次加工成型，只有一个结合口，并有强化PVC专用连接件，使整套轨道浑然一体，极大增加了轨道的刚度。在运输、安装过程中不变形，使用时滑动顺畅，承重安全。

异型轨道，规格根据现场实际而定，铝合金材质

医院输液轨道轨道及滑车

滑车上设有自锁梁,轨道上设有自锁枕。当吊杆承重时,自锁梁和自锁枕啮合,滑车会即时锁定在轨道上,从而固定住吊杆的位置。

滑车结构紧凑合理,减小拐弯半径,滑动灵活、顺畅。

滑车轮采用独特加工工艺,应用高科技纳米材料,国内首次真正实现静音、无尘、耐磨;

滑车形状会随着轨道弧形自动调整,保证在环型轨道上也可灵活滑动

轨道滑车车、轨道端堵、轨道连接器

轨道滑车车轮采用独特加工工艺,应用高科技纳米材料,国内首次真正实现静音、无尘、耐磨。采用优质的材料、合理的设计,可实现在2米轨道内拉行

医院输液轨道 天轨输液架组成

吊杆: 不锈钢双杆伸缩

连体: 钢镀铬

吊钩: 铝合金、钢镀铬、

升降调节: 无级手动随意调节

防尘: 防尘罩

??

????

????????

????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????**????????**?ACR??

“????????????” ?????????????????????????**????????????-??**

??“??”

??**????????**?NPF????????????????????**????????**

????????????

????????????????????

??

??????**ACR???**??“??”

?????????**??????**??“??”

