

医用输液轨道A广川医用输液轨道A医用输液轨道厂家

产品名称	医用输液轨道A广川医用输液轨道A医用输液轨道厂家
公司名称	河北凯茂塑料制品有限公司
价格	21.00/套
规格参数	品牌:鑫凯茂 型号:U型 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县党校南200米
联系电话	18231860778 18231860778

产品详情

轨道：铝合金材质，白色亚光色泽，有I型、U型、O型、L型、

规格：U、O、L型 32mm*28mm*1.2mm/1.3mm I型 32mm*28mm*1.0mm (长度按照客户要求订做)

适用范围

安装于医院、养老院、福利院等的医疗设施。

医院输液轨道产品特点

- 1、天轨输液轨道有O型、L型、U型、直型，也可特制各种异型轨道。
- 2、在运输、安装过程中不变形，使用时滑动顺畅，承重安全。
- 3、我们的安装采用塑料胀塞加木螺丝。
- 4、市场上的塑料胀塞太杂，安全性没有保障。我们自己开模具，制作加厚、材质优良、韧性好的塑料胀塞。100%保证了使用安全。

医院输液轨道安装方法

- 1、首先确定输液天轨的安装位置，一般安装在病床中央的天花板上。需注意避开灯风扇，手术室安装时应注意避开吊塔和无影灯。
- 2、测量所购天轨输液架的轨道安装孔孔距，用 8冲击钻头在天花板上钻出深度大于50毫米的孔，打入 8塑料膨胀（注意塑料膨胀打入后应与天花板平齐）。
- 3、将滑车装入轨道内，用M4×10自攻螺钉将塑料封头安装轨道两端（O型轨无堵头，其接头处应平整对齐，保证滑车能在轨道内自由滑动）。然后用M4×30平头自攻螺钉将轨道安装在天花板上。
- 4、安装完毕后，将吊杆挂在吊车挂钩上，检查其运转及其他性能。

医院输液轨道U型轨道，标准规格为1.8m*0.8m，铝合金材质

直型轨道，规格根据现场实际而定，铝合金材质

椭圆型轨道，标准规格为1.8m*0.8m，铝合金材质

椭圆型轨道采用独特工艺一次加工成型，只有一个结合口，并有强化PVC专用连接件，使整套轨道浑然一体，极大增加了轨道的刚度。在运输、安装过程中不变形，使用时滑动顺畅，承重安全。

异型轨道，规格根据现场实际而定，铝合金材质

医院输液轨道轨道及滑车

滑车上设有自锁梁,轨道上设有自锁枕。当吊杆承重时,自锁梁和自锁枕啮合,滑车会即时锁定在轨道上,从而固定住吊杆的位置。

滑车结构紧凑合理，减小拐弯半径，滑动灵活、顺畅。

滑车轮采用独特加工工艺，应用高科技纳米材料，国内首次真正实现静音、无尘、耐磨；

滑车形状会随着轨道弧形自动调整，保证在环型轨道上也可灵活滑动

轨道滑车车、轨道端堵、轨道连接器

轨道滑车车轮采用独特加工工艺，应用高科技纳米材料，国内首次真正实现静音、无尘、耐磨。采用优质的材料、合理的设计，可实现在2米轨道内拉行20000

医院输液轨道 天轨输液架组成

吊杆：不锈钢双杆伸缩

连体：钢镀铬

吊钩：铝合金、钢镀铬、

升降调节：无级手动随意调节

防尘：防尘罩