

医院输液轨道A杜桥医院输液轨道A医院输液轨道厂家

产品名称	医院输液轨道A杜桥医院输液轨道A医院输液轨道厂家
公司名称	河北凯茂塑料制品有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:鑫凯茂 型号:U型 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县党校南200米
联系电话	18231860778 18231860778

产品详情

医院输液轨道A杜桥医院输液轨道A医院输液轨道厂家

医院输液轨道安装指南

- 1、首先确定输液天轨的安装位置，一般安装在病床中央的天花板上。需注意避开灯风扇，手术室安装时应注意避开吊塔和无影灯。
- 2、测量所购天轨输液架的轨道安装孔孔距，用 8冲击钻头在天花板上钻出深度大于50毫米的孔，打入 8塑料膨胀（注意塑料膨胀打入后应与天花板平齐）。
- 3、将滑车装入轨道内，用M4×10自攻螺钉将塑料封头安装轨道两端（O型轨无堵头，其接头处应平整对齐，保证滑车能在轨道内自由滑动）。然后用M4×30平头自攻螺钉将轨道安装在天花板上。
- 4、安装完毕后，将吊杆挂在吊车挂钩上，检查其运转及其他性能。

医院输液轨道注意事项

- 1、本品为输液专用器械，使用时切忌用力猛拉、吊挂其它物品或儿童将其当秋千晃动；
- 2、每年应定时检查天轨输液架的安装牢固性、可靠性；
- 3、本产品使用环境应为相对湿度不大于90%，温度在-40 ~ 50 ，无腐蚀性气体环境中。
- 4、应定时清洁吊杆、吊勾、滑车，确保其随时处于清洁卫生状态。

医院输液轨道 输液轨道：

材质：铝合金（输液轨道截面规格型号齐全）

轨道整体规格：1.8*0.8*1.8

- 1、天轨输液轨道有直轨、U型轨、O型轨，也可特制各种异型轨道。
- 2、O型轨道采用独特工艺一次加工成型，只有一个结合口，并有强化PVC专用连接件，使整套轨道浑然一体，极大增加了轨道的刚度。在运输、安装过程中不变形，使用时滑动顺畅 凯茂医院输液轨道