

移动滑移垫加厚布料

产品名称	移动滑移垫加厚布料
公司名称	济南塔斯特生物科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:塔斯特 型号:H1 产地:山东济南
公司地址	济南市高新区工业南路44号
联系电话	18660129606

产品详情

塔斯特一次性滑移垫

产品介绍

塔斯特一直专注于病人转移方案的研究，经过多年不懈的努力，试验改进了上百种材质和方案，生产出“塔斯特一次性滑移垫”，实现了随时随地，轻松快速转移或平移病人，可帮助病人翻身。使用便捷，效果神奇，填补了市场空白。

产品组成：本产品由一次性滑移垫（80g以上）、一次性中单（床单）、吸水垫（吸附液体大于2kg）构成。

临床使用意义：

1. 不再费神费力：

滑移垫仅需1-2人即可将病人过床，代替原来需4-5人才能完成的工作，省力省时，可以大大减轻医护人员劳动强度

2. “病人不动式”过床：

骨折、手术后病人因为病痛或术后带有引流管等，往往不能搬动或触碰，使用一次性滑移垫病人完全不被搬动或触碰，即可平稳安全地被转移。

3. 有效避免二次损伤：

以往的搬运方法，采用多人在不同的部位、不同的用力大小抬送，病人极易感到不适，甚至还会因为搬运的不恰当方式导致病人损伤，滑移垫能让病人整体过床，避免二次损伤，实现轻松舒适整体转移。

使用说明：

1. 布 单

手术前将本产品平铺在手术台上，使两侧拉手位于病人肩、臀方位。将高分子吸水棉置于病人手术部位下方即可。

2. 缚 带病人上手术台后，将病人双手用缚带固定住3. 清 理

手术后抽除高分子吸水棉，清理血渍、体液等。

4. 移送(手术室)

将病人移送车与手术台并排对齐，调整高度至等高，拉动滑移垫的拉手，平稳的将病人移送至车上。

5. 移送(病房)

将病人推回病房后，将移送车与病床对齐并调至等高，拉动拉手将病人移送至病床。

6. 除 单

待病人身体恢复至可翻转，翻转病人身体撤除滑移垫。

注意事项

1.为确保使用效果，请将车/床/台高度调成一致,若有高度差应在15cm以内2.为保证安全，请将车/床/台并齐，若有间距应在10cm以内

3.移送病人时，对侧最好有助手协助推送患者。

适用范围：适用于手术室/急诊/ICU/病房/CT室/X线室/康复室等科室，医护人员将病人在手术台/病床/推车/CT台/X线检查台之间过床，以及康复或重病人护理中，病人被移位/侧身/清洁等。