

# 甘露醇恒温箱FYL-YS-430L

产品名称	甘露醇恒温箱FYL-YS-430L
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	888888.00/台
规格参数	品牌:福意联 容积:150-1028升 物流:德邦送货上门
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

甘露醇恒温箱FYL-YS-430L用途:

甘露醇是临床上普遍用于治疗颅脑疾病、脱水、降低颅内高压的药品.在天气寒冷的季节更容易结晶.传统的解决办法是用热水化开结晶,不但影响患者抢救和治疗,还无形中增加了护士的工作量.福意联甘露醇恒温保存柜,可用于已经结晶甘露醇在温度37~42度的环境里进行溶解,或25~27度的环境下保温,防止结晶现象的发生。

甘露醇恒温箱FYL-YS-430L公司说明--

我们销售的每一台仪器都保证功能完好,附件齐全,指标达到原出厂标准。公司提供较为完善的售后服务。每台仪器都提供一年保修、终身维护。一旦产品出现问题,保证24小时工作时间内的响应,并尽可能提供上门服务。多年来,公司本着诚信的经营理念,在国内开拓了广泛的市场,赢得了广大用户的优良与信赖,为众多分析提供了优良的解决方案。

甘露醇恒温箱FYL-

YS-430L参数:-----产品型号

容积大小 温度范围

外形尺寸-----型号:FYL-YS-150L 150L

温度:2~48 外型尺寸:595×570×865型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48

外型尺寸:595×590×1215型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48

外型尺寸:595×570×1445型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48

外型尺寸:595×695×1315型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48

外型尺寸:595×680×1805-----型号:FYL-

YS-151L 150L 温度:0~100 外型尺寸:595×565×860 型号:FYL-YS-281L 280L  
温度:0~100 外型尺寸:595×565×1440 型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100  
外型尺寸:595×675×1795-----

甘露醇恒温箱FYL-YS-430L使用说明:

- 1、先确认甘露醇恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。
- 2、确认甘露醇结晶程度，如果甘露醇结晶比较严重，已形成絮状结晶或块状，需要42度以上温度经行溶解，等完全溶解后把温度调为37度恒温保存；如果甘露醇没有结晶现象，只需要37度恒温保存，防止结晶及使用。
- 3、根据箱体大小放入相应的甘露醇瓶数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保甘露醇瓶完好不破裂现象。
- 4、使用者应根据甘露醇用量和甘露醇结晶情况来合理安排放入甘露的数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

甘露醇恒温箱FYL-YS-430L特点:

主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、制热系统、显示系统。

箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露

国产电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。

优良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。

制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

甘露醇恒温箱FYL-YS-430L相关:注意事项/甘露醇注射液 明显心肺功能损害者，因本药所致的突然血容量增多可引起充血性心力衰竭 高钾血症或低钠血症 低血容量，应用后可因利尿而加重病情，或使原来低血容量情况被暂时性扩容所掩盖 严重功能衰竭而排泄减少使本药在体内积聚，引起血容量明显增加，加脏负荷，诱发或加力衰竭； 对甘露醇不能耐受者。（7）给大剂量甘露醇不出现利尿反应，可使渗透浓度显著升高，故应警惕血高渗发生。（8）随访检查： 血压； 功能； 血电解质浓度，尤其是Na<sup>+</sup>和K<sup>+</sup>； 尿量。

勤发发