

融化甘露醇防结晶恒温箱

产品名称	融化甘露醇防结晶恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	888888.00/台
规格参数	品牌:福意联 容积:150-1028升 物流:德邦送货上门
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

融化甘露醇防结晶恒温箱用途:

甘露醇注射液属高浓度液体,遇天气寒冷时易产生结晶.在药房时,由于保持有稳定的温、湿度不易产生结晶,而到各临床科室后则易形成结晶,且有多次溶解又多次再结晶的现象,给临床使用带来了不便.福意联甘露醇恒温箱,应用于未结晶甘露醇或结晶后已溶解的甘露醇,取得了良好的预防结晶的效果。

融化甘露醇防结晶恒温箱公司说明--

北京福意电器公司自成立以来一直受到了广大用户的青睐，北京福意电器公司主要从事实验室、医疗温度相关产品的开发、制造和经营业务。公司的产品广泛应用于：医药、化工、科学、化工，，实验室，检测等单位部门。快捷、优良的服务为客户彻底解除后顾之忧。多年来，福意联在做好自身产品售后及维修工作，与客户建立长久。互信、双赢的合作伙伴关系，在客户中树立了良好的形象。

融化甘露醇防结晶恒温箱参数:-----产品型号

容积大小 温度范围

外形尺寸:-----型号:FYL-YS-150L 150L

温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 570 × 865型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 590 × 1215型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 570 × 1445型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 695 × 1315型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 680 × 1805-----型号:FYL-

YS-151L 150L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595 × 565 × 860型号:FYL-YS-281L 280L

温度:0 ~ 100 外型尺寸:595 × 565 × 1440型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0 ~ 100

外型尺寸:595 × 675 × 1795-----

融化甘露醇防结晶恒温箱使用说明:

加热溶解前确认结晶甘露醇，瓶体无裂缝，药液在有效期内，然后根据甘露醇加热柜体积大小放入相应数量的甘露醇竖放于托盘上，启动甘露醇加热柜，调节温度加热后，体积小的结晶可基本溶解，体积大的结晶明显缩小，如结晶较多或较大加热短时间未完全溶解的，在放入甘露醇加热柜内高温存放数小时后，结晶即可完全溶解。溶解后待甘露醇结晶溶解液体温度与体温相近后立即使用，也可在调25度以上，防止甘露醇再次结晶。

融化甘露醇防结晶恒温箱特点:

- 1) 产品为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统。
- 2) 箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3) 自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度不凝露。
- 4) 国产电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具备高低温报警功能，双安全门锁设计，保证箱体内部产品的安全存放。
- 5) 高精度电脑温度控制系统,箱体内部2个精密温度传感器，在环境温度-25 - 45 的状况下，仍能保持箱体内部温度 ± 1 优良稳定；
- 6) 智能控制风冷式结构，合理和空气循环系统，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7) LED显示面板，触摸式按键，在2-48 范围内可自由调节温度设定值，温度控制精度，物品存放更安全。
- 8) 低噪音设计,采用优良压缩机，噪音低于39dB(A)，。
- 9) 多搁架层设计，可根据存放物品的规格合理调节间隙，充分利用空间，优良不锈钢调整搁架，存取物品方便，且易于清洗
- 10) 低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。
- 11) PTC陶瓷复合加热，加热稳定，升温均衡。均匀制冷恒温效果好。

融化甘露醇防结晶恒温箱相关:甘露醇注射液，适应症为1.组织脱水药。用于治疗各种原因引起的脑水肿，降低颅内压，防止脑疝。2.降低眼内压。可有效降低眼内压，应用于其他降眼内压药无效时或眼内手术前准备。3.渗透性利尿药。用于鉴别前性因素或急性功能衰竭引起的少尿。亦可应用于预防各种原因引起的急性小管坏死。4.作为辅助性利尿措施治疗病综合征、肝硬化腹水，尤其是当伴有低蛋白血症时。