

甘露醇恒温箱FYL-YS-431L

产品名称	甘露醇恒温箱FYL-YS-431L
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	888888.00/台
规格参数	品牌:福意联 容积:150-1028升 物流:德邦送货上门
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

甘露醇恒温箱FYL-YS-431L用途:

20%甘露醇是临床必备抢救药品之一，用于各种原因引起的脑水肿、降低颅内压、防止脑疝等。该药品易结晶，福意联甘露醇恒温箱,应用于未结晶甘露醇或结晶后已溶解的甘露醇,取得了良好的预防结晶的效果。

甘露醇恒温箱FYL-YS-431L公司说明--

福意联公司将以科学的管理、灵活的经营机制、完善的售后服务，不断开拓创新制造出高科技产品，追求的福意联品牌，迅速发展成为我国医用加温中优良有潜力和优势的企业。为医疗系统提供安全、可靠、的产品而不懈努力！

甘露醇恒温箱FYL-

YS-431L参数:-----产品型号

容积大小 温度范围

外形尺寸-----型号:FYL-YS-150L 150L

温度:2~48 外型尺寸:595×570×865型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48

外型尺寸:595×590×1215型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48

外型尺寸:595×570×1445型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48

外型尺寸:595×695×1315型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48

外型尺寸:595×680×1805-----型号:FYL-

YS-151L 150L 温度:0~100 外型尺寸:595×565×860型号:FYL-YS-281L 280L

温度:0~100 外型尺寸:595×565×1440型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100

外型尺寸:595 × 675 × 1795-----

甘露醇恒温箱FYL-YS-431L使用说明:

加热溶解前确认结晶甘露醇，瓶体无裂缝，药液在有效期内，然后根据甘露醇加热柜体积大小放入相应数量的甘露醇竖放于托盘上，启动甘露醇加热柜，调节温度加热后，体积小的结晶可基本溶解，体积大的结晶明显缩小，如结晶较多或较大加热短时间未完全溶解的，在放入甘露醇加热柜内高温存放数小时后，结晶即可完全溶解。溶解后待甘露醇结晶溶解液体温度与体温相近后立即使用，也可在调25度以上，防止甘露醇再次结晶。

甘露醇恒温箱FYL-YS-431L特点:

- 1、款式：立式。
- 2、温度控制：微电脑控制，箱内温度2-48 可调；LED温度.
- 3、数字显示，便于远距离观察；超温报警。
- 4、安全报警系统：两种报警示方式（声音蜂鸣报警）；
- 5、外箱材料：采用冷轧钢板。
- 6、内胆材料：采用PS吸附内胆，永不生锈。
- 7、制冷剂：无氟制冷剂。
- 8、压缩机：采用国产压缩机。
- 9、风机：采用国产冷凝风机。
- 10、门锁设计：门锁设计,储藏物品更安全。。
- 11、可移动搁架，储存更多，更容易区分。
- 12、开机延时保护功能。
- 13、宽电压带设计（187—242V），便于移动。

甘露醇恒温箱FYL-YS-431L相关:甘露醇的降颅压作用，不仅是单纯的利尿，而且主要在于造成渗透压增高，使脑组织的水分吸入，从而减轻脑水肿、降低颅内压。一般在静脉注射后20分钟内起作用，2-3小时降压作用达到高峰，可维持4-6小时。常用剂量为0.25-0.5 g/kg.次成人用量。但多年的临床实践证明，甘露醇除了能引起低钾，诱发或加重，血尿、功不全、功衰竭及过敏反应外还具有其他并发症。

勤发发