

隔帘轨道|输液轨道吊杆|铝合金输液轨道|医院输液轨道

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 隔帘轨道 输液轨道吊杆 铝合金输液轨道 医院输液轨道 |
| 公司名称 | 河北凯茂塑料制品有限公司 |
| 价格 | 6.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:鑫凯茂 型号:U型 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县党校南200米 |
| 联系电话 | 18231860778 18231860778 |

产品详情

隔帘轨道|输液轨道吊杆|铝合金输液轨道|医院输液轨道

轨道：铝合金材质，白色亚光色泽，有I型、U型、O型、L型、

规格：U、O、L型 32mm*28mm*1.2mm/1.3mm I型 32mm*28mm*1.0mm (长度按照客户要求订做)

适用范围

安装于医院、养老院、福利院等的医疗设施。

医院输液轨道产品特点

- 1、天轨输液轨道有O型、L型、U型、直型，也可特制各种异型轨道。
- 2、在运输、安装过程中不变形，使用时滑动顺畅，承重安全。
- 3、我们的安装采用塑料胀塞加木螺丝。
- 4、市场上的塑料胀塞太杂，安全性没有保障。我们自己开模具，制作加厚、材质优良、韧性好的塑料胀塞。100%保证了使用安全。

医院输液轨道滑车

滑车可在轨道上任意移动，当吊杆承重时，滑车会固定吊杆的位置；

滑车结构紧凑合理，减小拐弯半径，滑动灵活、顺畅；

滑车轮采用独特加工工艺，应用高科技纳米材料，国内真正实现静音、无尘、耐磨；

滑车形状会随着轨道弧形自动调整，保证在环型轨道上也可灵活滑动。

医院输液轨道安装方法 www.kaimaochina.com

- 1、首先确定输液天轨的安装位置，一般安装在病床上天花板上。需注意避开灯风扇，手术室安装时应注意避开吊塔和无影灯。
- 2、测量所购天轨输液架的轨道安装孔孔距，用 8冲击钻头在天花板上钻出深度大于50毫米的孔，打入 8塑料膨胀（注意塑料膨胀打入后应与天花板平齐）。
- 3、将滑车装入轨道内，用M4×10自攻螺钉将塑料封头安装轨道两端（O型轨无堵头，其接头处应平整对齐，保证滑车能在轨道内自由滑动）。然后用M4×30平头自攻螺钉将轨道安装在天花板上。
- 4、安装完毕后，将吊杆挂在吊车挂钩上，检查其运转及其他性能。

医院输液轨道U型轨道，标准规格为1.8m*0.8m，铝合金材质

直型轨道，规格根据现场实际而定，铝合金材质

椭圆型轨道，标准规格为1.8m*0.8m，铝合金材质

椭圆型轨道采用独特工艺一次加工成型，只有一个结合口，并有强化PVC专用连接件，使整套轨道浑然一体，极大增加了轨道的刚度。在运输、安装过程中不变形，使用时滑动顺畅，承重安全。

异型轨道，规格根据现场实际而定，铝合金材质

医院输液轨道轨道及滑车

滑车上设有自锁梁,轨道上设有自锁枕。当吊杆承重时,自锁梁和自锁枕啮合,滑车会即时锁定在轨道上,从而固定住吊杆的位置。

滑车结构紧凑合理，减小拐弯半径，滑动灵活、顺畅。

滑车形状会随着轨道弧形自动调整，保证在环型轨道上也可灵活滑动

轨道滑车车、轨道端堵、轨道连接器

轨道滑车车轮采用独特加工工艺，应用高科技纳米材料，国内真正实现静音、无尘、耐磨。采用优质的材料、合理的设计，可实现在2米轨道内拉行200000次

