

医用隔断轨|医用隔帘轨|窗帘轨道|医院医疗窗帘轨道|输液轨道

产品名称	医用隔断轨 医用隔帘轨 窗帘轨道 医院医疗窗帘轨道 输液轨道
公司名称	河北凯茂塑料制品有限公司
价格	21.00/套
规格参数	品牌:鑫凯茂 型号:U型 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县党校南200米
联系电话	18231860778 18231860778

产品详情

适用范围 安装于医院、养老院、福利院等设施。产品特点 1、天轨输液轨道有O型、L型、U型、直型，也可特制各种异型轨道。 2、在运输、安装过程中不变形，使用时滑动顺畅，承重安全。 3、我们的安装塑料胀塞加木螺丝。 4、市场上的塑料胀塞太杂，安全性没有保障。我们自己开模具，制作加厚、材质优良、韧性好的塑料胀塞。

滑车可在轨道上任意移动，当吊杆承重时,滑车会固定吊杆的位置；滑车结构紧凑合理，减小拐弯半径，滑动灵活、顺畅；滑车轮采用独特加工工艺，应用高科技纳米材料；滑车形状会随着轨道弧形自动调整，环型轨道上也可灵活滑动

医院输液轨道 天轨输液架组成

吊杆：不锈钢双杆伸缩

连体：钢镀铬

吊钩：铝合金、钢镀铬、

升降调节：无级手动随意调节

防尘：防尘罩

医院输液轨道产品材质和规格

不锈钢内管：（12.7mm×0.4mm）

不锈钢外管：（16mm×0.8mm）

内管升降高度为0.5m左右

拉开距地面高度为1.5m左右

合到一起距地面高度为2m左右

吊架外管长度根据房高订做

医院输液轨道滑车

可在轨道上任意移动，当吊杆承重时,滑车会固定吊杆的位置；

滑车结构紧凑合理，减小拐弯半径，滑动灵活、顺畅；

滑车轮采用独特加工工艺，应用高科技纳米材料，国内首次真正实现静音、无尘、耐磨；

滑车形状会随着轨道弧形自动调整，保证在环型轨道上也可灵活滑动。

医院输液轨道轨道

轨道：铝合金材质，白色亚光色泽，有I型、U型、O型、L型、

规格：30*20*1.2mm/ 32*26*1.4mm/35*23*1.5mm(1.8*0.8*1.8)

I型 长度按照客户要求订做

医院输液轨道安装指南

1、首先确定输液天轨的安装位置，一般安装在病床中央的天花板上。需注意避开灯风扇，手术室安装时应注意避开吊塔和无影灯。

2、测量所购天轨输液架的轨道安装孔孔距，用 8冲击钻头在天花板上钻出深度大于50毫米的孔，打入 8塑料膨胀（注意塑料膨胀打入后应与天花板平齐）。

3、将滑车装入轨道内，用M4×10自攻螺钉将塑料封头安装轨道两端（O型轨无堵头，其接头处应平整对齐，保证滑车能在轨道内自由滑动）。然后用M4×30平头自攻螺钉将轨道安装在天花板上。

4、安装完毕后，将吊杆挂在吊车挂钩上，检查其运转及其他性能。

医院输液轨道注意事项

- 1、本品为输液专用器械，使用时切忌用力猛拉、吊挂其它物品或儿童将其当秋千晃动；
- 2、每年应定时检查天轨输液架的安装牢固性、可靠性；
- 3、本产品使用环境应为相对湿度不大于90%，温度在-40 ~ 50 ，无腐蚀性气体 环境中。
- 4、应定时清洁吊杆、吊勾、滑车，确保其随时处于清洁卫生状态。