

# 供应骨科小夹板

产品名称	供应骨科小夹板
公司名称	安平县康博医疗器械有限公司
价格	20.00/件
规格参数	品牌:康隆达 型号:加工定做 产地:河北省安平县
公司地址	河北省衡水市安平县
联系电话	0318-8091006 15127820006

## 产品详情

骨科小夹板简介：是一种简单实用的治疗器具，四肢骨折时用作固定骨折部位的薄板，用柳木、杉木或胶合板等按肢体的长短制成。小夹板为民间广泛应用的骨科治疗技术之一，能对骨折或软组织损伤等起到积极的治疗作用，并具有一定的维持对位及缓慢复位作用。但出了种种原因，引起肢体缺血性改变的发生率较高。因此在应用时必须严格掌握适应证，对不适宜应用的病例，对不能密切观察的随访者，以及未掌握操作要领者，切勿滥用，以防发生无法挽回时严重后果。

骨科小夹板禁忌证：

- 1、错位明显之不稳定性骨折。
- 2、伴有软组织开放性损伤、感染及血循环障碍者。
- 3、躯干骨骨折等难以确实固定者。
- 4、昏迷或肢体失去感觉功能者。

骨科小夹板使用方法及注意点：

- 1、纸压垫要准确地放在适当位置上，并用胶布固定，以免滑动。
- 2、捆绑束带时用力要均匀，其松紧度应使束带在夹板上可以不费力地上下推移1厘米为宜。
- 3、在麻醉未失效时，搬动患者应注意防止骨折再移位。
- 4、抬高患肢，密切观察患肢血运，如发现肢端严重肿胀、青紫、麻木、剧痛等，应及时处理。

- 5、骨折复位后4天以内，可根据肢体肿胀和夹板的松紧程度，每天适当放松一些，但仍应则以上下推移1厘米为宜；4天后如果夹板松动，可适当捆紧。
- 6、开始每周酌情透视或拍片1~2次；如骨折变位，应及时纠正或重新复位。必要时改作石膏固定。
- 7、2~3周后，如骨折已有纤维连接，可重新固定，以后每周在门诊复查1次，直至骨折临床愈合。
- 8、及时指导患者功能锻炼。