

猪用B超机兽用B超机小型B超机高清B超机

产品名称	猪用B超机兽用B超机小型B超机高清B超机
公司名称	山东佰牧兴畜牧机械有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	品牌:山东佰牧兴 显示器:5.8英寸高亮LED屏 主机尺寸:206*130*50mm
公司地址	山东省德州市齐河城区齐安大街7号(注册地址)
联系电话	17853401517 17853401517

产品详情

猪场在采用B超机对母猪进行妊娠检查时，测孕的最佳时间段建议是配种后25天到30天，因为此时孕囊最明显且呈现规则的圆形黑洞，最易判断。越往后随着孕囊的发育，孕囊会变得不规则，反而不如前期好判断，但是和空怀的图像相对比还是能明显的发现其不同之处。当母猪妊娠天数达到70天以后，小猪骨骼钙化，此时在B超图像上显示的为一条间断的形式虚线的弧线，此为小猪的脊椎骨，此时应以此为判断母猪是否怀孕。

方法/步骤

1保定：使用掌上B超检测母猪一般不需要保定，只要使其保持安静即可，有条件的话在限位栏中对母猪进行检测更方便，姿势侧卧，安静站立最好，趴卧，或采食均可。

2探查部位：体外探查一般在下腹部左右，后肋部前的乳房上部，从最后一对乳腺的后上方开始，随妊娠增进，探查部位逐渐前移，最后可达肋骨后端。猪被毛稀少，探查时不必剪毛，但需要保持探查部位的清洁，以免影响B超图像的清晰度，体表探查时，探头与猪皮肤接触处必须涂满藕合剂。如是直肠检查则无需藕合剂。

3探查方法：体外探查时探头紧贴腹壁，妊娠早期检查，探头朝向耻骨前缘，骨盆腔入口方向，或成45度角斜向对侧上方，探头贴紧皮肤，进行前后和上下的定点扇形扫查，动作要慢。妊娠早期胚胎很小，要细心慢扫才能探到，切勿在皮肤上滑动探头，快速扫描。(探查的手法可根据实际情况灵活运用，以能探查到子宫里面情况为准，当猪膀胱充尿胀大，挡住子宫，造成无法扫到子宫或只能探查到部分子宫时应等猪只排完尿以后再进行探测)。

