

医院输液轨道A凯茂医院输液轨道A医院医用输液轨道厂家

产品名称	医院输液轨道A凯茂医院输液轨道A医院医用输液轨道厂家
公司名称	河北凯茂塑料制品有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:鑫凯茂 型号:U型 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县党校南200米
联系电话	18231860778 18231860778

产品详情

医院输液轨道A忠县医院输液轨道A医院医用输液轨道厂家

病房输液轨道：铝合金材质，白色亚光色泽，有I型、U型、O型、L型、规格：U、O、L型。32mm*28mm*1.2mm/1.3mm I型 32mm*28mm*1.0mm (长度按照客户要求订做)。适用范围：安装于医院、养老院、福利院等的医疗设施。产品特点1、天轨输液轨道有O型、L型、U型、直型，也可特制各种异型轨道2、在运输、安装过程中不变形，使用时滑动顺畅，承重安全。3、我们的安装采用塑料胀塞加木螺丝。4、市场上的塑料胀塞太杂，安全性没有保障。我们自己开模具，制作加厚、材质优良、韧性好的塑料胀塞。保证了使用安全。欢迎新老客户咨询致电！样品免费提供。

医院输液轨道安装方法：

- 1、首先确定输液天轨的安装位置，一般安装在病床中央的天花板上。需注意避开灯风扇，手术室安装时应注意避开吊塔和无影灯。
- 2、测量所购天轨输液架的轨道安装孔孔距，用 8冲击钻头在天花板上钻出深度大于50毫米的孔，打入 8塑料膨胀（注意塑料膨胀打入后应与天花板平齐）。
- 3、将滑车装入轨道内，用M4×10自攻螺钉将塑料封头安装轨道两端（O型轨无堵头，其接头处应平整对齐，保证滑车能在轨道内自由滑动）。然后用M4×30平头自攻螺钉将轨道安装在天花板上。
- 4、安装完毕后，将吊杆挂在吊车挂钩上，检查其运转及其他性能。
- 5、由于天花种类繁多，不同天花类型，轨道的安装方法不一样，详情请致电我司工程师，我们将为您一一解答。