

医用氧气瓶 手术用品 氧气瓶

产品名称	医用氧气瓶 手术用品 氧气瓶
公司名称	冀州市恒嘉医疗器械厂
价格	.00/个
规格参数	类别:手术用品 功能:氧气瓶 :便携式医用供氧器
公司地址	中国 河北 衡水市 衡水市冀州
联系电话	86 0318 8964263 13932813665

产品详情

类别	手术用品	功能	氧气瓶
便携式医用供氧器			
皮革包装箱			
铝合金包装箱			

便携式医用供氧器使用说明书一、

概述便携式医用供氧器是一种具有流量调节器的小型、轻便的医用供氧装置。二、技术参数1. 最大贮氧压力为13mpa。2. 供氧流量1-10l/分钟连续可调。3.

当充注压力为13mpa时，供氧器处于关闭和任意开启状态下应无泄露。贮氧量及参考供氧时间:

规格	2l	3l	4l	7l	8l	10l	15l
贮氧量l*	260	420	560	980	1120	1400	2100
使用时间h**	3-4	5-6.5	6.5-8.5	10-15	15-18	16-19	19-26

注：*指工作压力时13mpa的贮氧量**使用时间按流量1l/分钟工作压力10—13mpa计算。

三、适用范围1. 缺氧性疾病患者2. 高原缺氧3. 氧保健四、工作原理打开供氧器开关，氧气瓶内高压氧气经减压阀，再经过流量调节开关进行微调，即可输出所需的流量，连好导氧管，加湿器、吸氧管和鼻塞即可输氧。五、使用方法1. 使用前的准备和检查使用前必须到法定的医用氧气站充装氧气。检查氧气储量、打开气瓶开关，观察氧压表的指示即可知储气瓶内的储氧量，如压力氧量小于0.05-0.1mpa时，应补充医用氧气。2. 加湿器的使用a：使用时拧下上盖，往加湿器中加入蒸馏水或冷开水至上下水位标线之间。拧紧上盖，水位低于下标线时及时补加水。b：按加湿器上部的标记，将供氧器出氧管接到加湿器的供氧嘴上，将吸氧管接到加湿器的出氧嘴上，切勿接反（参见图2）c：使用前仔细检查导氧管、吸氧管、加湿器、是否清洁。d：当氧气通过加湿器时，可以看到杯内有气泡出现，表示加湿器工作正常

。六、吸氧1 .

缓慢打开气瓶开关，根据需要调节至适当流量再将输氧鼻塞插入鼻前庭部位即可输氧见图1。2 .

吸氧完毕先拔出鼻塞关闭气瓶开关，待压力降至0时，再关闭流量调节阀。七、注意事项1 .

充装氧气必须到法定的医用氧气充装站。2 . 加湿器严禁倾斜。3 . 使用环境温度不得超过40 。4 .

气瓶开关，开启与关闭应缓慢，不要用力过猛。5 . 供氧器应严禁沾染油污，严禁碰撞、扔摔，远离热源、火种及易燃易爆物品，避免强日光直接照射，不得粘贴橡皮膏。6 .

非使用期间，气瓶开关必须处于关闭状态。7 . 气瓶内氧气压力不得低于0.05mpa。8 .

产品出现故障不能继续使用，也不得随意拆卸，及时和经销商或厂家联系。9 .

按瓶肩部钢印时间，每三年送具备法定资格的检验单位进行检验。10 .

缺氧性疾病患者，应在医生指导下选择氧流量大小。11 .

第一次向氧气瓶内充氧时，应进行医用氧置换。12 . 导氧管仅供一次性使用。