

中药汽疗仪的生产基地

产品名称	中药汽疗仪的生产基地
公司名称	济南华乐医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	华乐牌:220v
公司地址	山东省济南市历城区荷花路1617号
联系电话	0531-88272328 13808920650

产品详情

QLY-E2型[中药熏蒸舱](#) ([中药汽疗仪](#))

华乐中药熏蒸舱（中药汽疗机）是用于溶液蒸煮产生蒸汽、提升溶液熏蒸的应用价值而研发的产品。熏蒸舱是用溶液煎煮产生的蒸汽来熏蒸人体以达到临床应用的一种医疗器械。为药物熏蒸的承载体。QLY-E2型中药熏蒸舱(中药汽疗仪)是一种利用祖国中医传统医学外治理论的熏蒸疗法，对患者进行全身熏蒸透皮治疗的高科技、智能化产品。

产品特点：

01、中药汽离子熏蒸渗透疗法，熏蒸由皮肤给药，可避免药物对口腔粘膜、消化道及胃肠的刺激，减轻肝脏、肾脏负担，药物直达患处，疗效好、副作用少

02、采用多级安全保护、机电分离设计，具有自动漏电保护功能，使用安全可靠

- 03、足底循环送气系统、温度均衡、时间控制精确，确保疗效
- 04、具有冷凝水回收功能，确保舱体内干爽
- 05、舱体材料及主要使用配件均采用进口材料，质量可靠、性能稳定
- 06、治疗结束后熏蒸舱内自动臭氧（O₃）舱体消毒、独具隔离垫防水设计，避免医源性交叉感染
- 07、操作使用简单、易学易用，掌握常用药物和熏蒸方剂的治疗作用和应用范围，即可操作
- 08、具备USB接口、FM收音/CD/MP3音乐播放功能；方便病人使用，使治疗更加轻松、舒适，有助于药物吸收
- 09、舱内温度自动调节、温控精确、升温迅速、节能保温
- 10、采用最新一代光感触摸屏设计（没有按键，光线感应信号处理），高科技含量
- 11、舱体内外一体白色进口压克力材料，一次脱模成型；易清洗、抗菌、绝缘、密度高、不渗透、耐磨、不变色
- 12、患者熏蒸治疗完成可直接进行舱内淋浴、冲洗
- 13、超温报警功能：温度高于安全温度，仪器自动停机并报警；配备恒温装置

- 14、LED炫彩灯光舱内照明
- 15、全自动供水、治疗完成自动排水控制
- 16、开机自动进水，水位全自动控制，防止缺水、缺水语音提示功能
- 17、开启、关闭舱盖拥有液压助力功能，方便患者舱内自行开启
- 18、舱温设定值与治疗实际值同步监测
- 19、时间设定值与运行值同步显示
- 20、具有自动防止干烧功能
- 21、独具加热集成系统自动清洗功能
- 22、配带足底按摩踏板
- 23、通过YY0505-2012国家强制性电磁兼容检测
- 24、赠送200个中药配方供临床应用及参考资料供临床应用

技术参数：

熏蒸温度：（室温）0 ~ 70 （可调）

煎药温度：37 ~ 99

温度检测误差： 1

薰蒸时间：1~70分钟（可调）

加热器容量：>8000ml

净重：98kg

最大载荷：140kg 电源电压：AC220V/50Hz

毛重：160kg

外形尺寸：1550×750×1215mm

功率：2000W

舱体材料：双层进口医用亚克力内、外壳

款式：封闭半躺式

薰蒸模式：露头式全身薰蒸

中药熏洗疗法具有悠久的历史和丰富的内容，是祖国医学治疗学中的一种独特的中医外治方法。它是利用专业煎药器将所需药物煎煮沸腾产生中药气体，利用其产生的中药气体进行全身和局部中药蒸汽熏蒸也可用药液熏洗人体病变部位，以达到治疗皮肤病、关节疼痛、美肤美体、强身健体目的的一种方法。

济南华乐医疗熏洗疗法是以祖国医学脏腑经络学的理论为依据的。从整体观念出发，认为人体的生理、病理活动是五脏六腑通过经络系统，把全身组织器官连接成一个有机的整体而进行的。脏腑是人体生理机能的核心，又是生命活动的主宰；经络是人体内运行气血的通道，又是纵横交错、沟通表里、联系上下的纽带。既有运行脏腑气血的作用，又有调节脏腑阴阳平衡的功能。华乐熏蒸医疗器械中药熏蒸的目的：疏通腠理、调和气血、平衡阴阳，达到治病强身的目的。

中药汽疗仪中药煎煮药汽渗透疗法原理可以概括如下：

1、华乐中药汽疗仪熏蒸药物的直接作用：通过多功能中药汽疗仪熏洗给药的方法，药汤中的有效成分直接接触肌肤、粘膜部位，起到清热解毒、消肿止痛、祛风止痒、去腐生肌、杀菌杀虫的作用。对于发生在皮肤、肌肉处的痈疮、跌打损伤、肛肠疾病、外阴疾病、眼病及疹癣等皮肤病有很好的疗效，而且比内服药更为有效和快捷。

2、中药熏蒸舱熏蒸局部得刺激作用：通过中药熏洗由于温热和药物刺激，可使局部血管扩张，促进血液和淋巴液的循环，改善周围组织的营养，起到活血祛瘀、消炎止痛、润肤悦颜的作用。熏蒸治疗对软组织损伤、风湿痹症、美肤祛斑等有良好的作用。同时，还能刺激皮肤内的神经末梢感受器，通过神经反射，达到增强肌体免疫功能和调整器官组织功能的作用，有利于防病和健身。

3、中药熏蒸气疗仪药汽离子皮肤吸收的作用：熏洗疗法往往先熏后洗，是药物离子的有效成分通过皮肤、粘膜吸收、渗透进入人体，通过经络的输布、脏腑的调节到达病处或者调节全身功能，起到内病外治的目的，且无痛苦，无副作用，疗效好等优点。

4、熏蒸舱经络输布作用：人体经过经络构成有机的联系整体。十二经脉内属脏腑，外络

肢节，与奇经八脉相沟通，于体表皮肤、五官九窍皮肉筋骨等紧密相连，联系全身，起着行气血、营阴阳、濡筋骨、利关节的作用。中药熏洗药物的有效成分和温热刺激通过经络可以渗透入脏腑，到达病处，达到防病治病的目的。

5、华乐[中药熏蒸床](#)

脏腑调衡作用：五脏六腑表里相属，通过经络与人体相连，熏洗药物和温热刺激通过经络的输布作用，到达五脏六腑，在通过脏腑的调节、平衡、调整全身机能，达到治愈疾病的目的。

综上所述，华乐牌熏蒸器械的作用机理不外乎整体作用和局部作用两个方面（中药熏蒸舱、中药汽疗仪）、两个类型。这两方面作用不是孤立的，而是相互协同的。在防治疾病过程中，这两方面的作用同时发挥，也可以以某一方面为主，而疗效又是受多种因素的影响，如人体皮肤的完整性、中药方剂的选择，配置的方法，熏蒸舱蒸汽温度的高低、熏蒸汽疗仪熏蒸时间的长短、熏蒸床单位时间出气量的大小等，在实际应用中我们根据具体临床应用，既考虑到熏蒸温度的精确性、又要考虑中药熏蒸蒸汽浓度尽量大、还要节约能源、熏蒸舱出气部位的合理性、熏蒸床结构的可行性；考虑这些因素，华乐医疗器械中药熏蒸科研的目的以尽量提高中药运用熏蒸床（舱）提高熏洗渗透提取药物离子治愈疾病的新途径、新疗法，中药熏蒸舱、中药汽疗仪、中药熏蒸床也可以叫做中药加速器、中药加速仪或中药提速仪。

制造商：济南华乐医疗器械有限公司