

婴儿身高体重秤 儿保体检卧式婴儿身高体重秤

产品名称	婴儿身高体重秤 儿保体检卧式婴儿身高体重秤
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	4900.00/台
规格参数	型号:HW-B60 适用年龄:0-3岁婴幼儿 适用范围:保健院 儿保体检
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

产品详情

婴儿身高体重秤 儿保体检卧式婴儿身高体重秤

乐佳HW-B60系列婴儿秤主要适用于0-3岁婴幼儿测量身高、体重，这两款超声波婴儿秤都是ABS工程塑料开模整体成型的，其中HW-B70型为身高和体重超声波全自动测量，测量结果可以数码显示、可以语音播报、可以打印小票；HW-B60型体重是电子自动测量，身高手动测量，表头带有不间断电源，外出插电不方便或者停电后，内置电池能坚持待机36小时。

性能特点--

1、人性化设计

整机包装，不需要复杂安装

外置脚踏式测量开关，避免了没有准备好的情况下开始测量，保证测量快速精准

仪器边缘镶嵌精准刻度尺，辅助测量

滑动挡板移至婴儿脚底锁定身高，避免了婴儿乱动，身高测量不准

整机ABS工程模具成型，结实耐用，流线型外观，精致大气，柔和亲肤

2、属性特点

全自动一体化测量身高体重

同步清晰语音播报，高亮数码显示

进口测量元器件，保证产品测量性能稳定

可选外置热敏打印机，打印测量报告

底部上下可调节支脚，机器平稳测量，保证测量精度

3、大量程

适用于0-3岁婴幼儿平躺式身高体重测量

婴儿身高体重秤 儿保体检卧式婴儿身高体重秤性能参数：

卧式婴儿量床,婴幼儿电子身高体重秤

我们的地址：郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209电话：86-182-03652601联系手机：18203652601 期待您的咨询

一、简单操作说明：

- 1.打开机箱，把里边泡沫打扫干净。
- 2.将底部四个支脚拧上橡胶轮支脚上平面要超出机箱底部平面一厘米，然后四个支脚调平。机器放在硬桌面上使用。
- 3.本机身长手动测量，把婴幼儿抱着放在秤体凹槽内，头部对着机器左侧,用移动挡板对平脚底部，读出身高/坐高值。
- 4.体重数据自动测量测量，数码显示在显示屏上。

二、操作注意：

- 1.确认秤体周围无异物支撑
- 2.如需铺垫被、褥、包褥等，可将其先在秤盘内铺好再开机，可自动去皮。
- 3.本机需放在硬平面上使用。

三、技术指标：

- 1.产品型号：HW-B60
- 2.体重测量范围：0-60kg
- 3.体重测量分辨率：0.05kg / ± 0.01 kg
- 4.身高测量范围：0-120cm
- 5.身高测量分辨率： ± 0.5 cm
- 6.电源：DC 12V AC：110—240V
- 7.功率：10 W
- 8.具有去皮、置零、累清、累加等功能、自动锁定重量数据并显示婴儿体重
- 9.内置不间断电源，在没有外接电源或突然断电时可继续长时间使用，在外接电源时自动充电。
- 10.环境温度：- 1 0 ~ + 4 0
- 11.外形尺寸: 129(长) × 47(宽) × 30(高)cm

四、功能设定及调整：

【开/关】：开关键，在称重状态下长按关机，断电状态长按开机

【累清】：累清键，在标定状态下它是退出功能

【功能】 kg/lb转换键，在标定状态下它是闪烁位左移功能

【累加】 累加键，在标定状态下它是闪烁位右移功能

【去皮】 去皮键，在标定状态下它是切换参数或光标闪烁位数字加一功能

【置零】 置零键，在标定状态下它是确认功能