

便携智能体检仪 乐佳HW-900B折叠便携式智能体检一体机

产品名称	便携智能体检仪 乐佳HW-900B折叠便携式智能体检一体机
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	22800.00/台
规格参数	品牌:乐佳 型号:HW-900B 便携式:机身可定制折叠
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

产品详情

便携智能体检仪 乐佳HW-900B折叠便携式智能体检一体机

一、河南乐佳电子科技有限公司主要研发生产销售健康体检仪器，乐佳HW-900B便携式智能体检一体机用于社区服务中心、卫生院、体检中心、疾控中心、学校等健康体检测量，全自动一体化自助体检，不需要外人协助下，可由体检者按照提示或说明自行操作，完成所需项目的检测；体检机除了可进行身高、体重、体温、血压、心率四项检测外，还可根据需要增加检测体温、血氧、脂肪、基础代谢、水分含量、骨骼量、肌肉量等其他人体成分，整个测量结束后，可上传健康管理系统，人性化设计，给体检工作带来方便。

二、乐佳HW-900B型体检一体机技术指标：

身高元器件: 超声波测距(美国原装探头并实现温差补偿)

身高范围：60-200cm 分度值0.5cm

体重元器件:精密平衡梁式压力传感器称重

体重范围：8-200kg 分度值0.1kg

血压元器件：示波测定法（日本欧姆龙电子血压计）

血压范围：0-299mmHg(0-39.9kpa)

脉搏范围：40-180次/min

体型:国际通用体格指数(BMI)指示体型 (偏瘦、正常、偏胖、肥胖)

成人正常血压数值范围 :

收缩压 : 90~139 (mmHg) , 舒张压 : 60~89 (mmHg)

三、性能特点 :

显示方式:主显示屏LED大显示屏,显示测量结果,待机状态下显示当前日期、时间,室内环境温度

折叠机定制:机身可定制折叠,折叠后120cm,可车载下乡体检,移动方便。

打印方式:热敏打印,自动裁纸(日本精工热敏打印机)打印测量报告

语音提示:有语音自动播报测量结果

数据输出格式:RS-232标准格式,可以链接电脑管理系统,数据上传

电源电压:交流(照明电):110V-240V,50HZ

直流(蓄电池):12V ± 10%

功耗: 待机时功率: 8 W 测量时功率: 12 W

工作环境: 环境温度: - 10 ~ + 40 环境湿度: < 85 %

整机重量:毛重:47kg 净重:42kg

外形尺寸:MAX:55(L) × 33(W) × 235(H)cm

在您开机通电以前,请务必注意以下几点操作:

- 1、 去掉机箱里边的支撑泡沫并将机箱内部清理干净
- 2、 每次打开电源前,必须保持秤盘上没有任何物体。
- 3、 每次折叠时,都需要用扎带固定好上下机身,以防止上部机身左右晃动(内有扎带,请妥善保管)

注意:本说明书的功能、示例等均以基础型号为例加以说明,未完全包含后续的更新、改进,使用中请以实际配置为准!

安装说明:

- 1.去掉木箱底部的四个螺丝
- 2.去掉机箱内的支撑泡沫,取出整机,打开扎带(注:扎带需妥善保管,以便以后折叠运输过程中使用)

常规操作

连接好电源线，接通电源，屏幕显示初始化信息。

机器完成初始化后，屏幕从上至下分别显示为日期

（如：0906 表示日期），时间（如：13:30 表

示时间），后一个显示为温度。

注意：开机前请确保输入电源电压为直流12V，此时秤盘上不能有任何重物。

测量：启动后就进入待机测量状态。机器会检测秤盘变化，当检测到有人站在秤盘上时，开始同时测量身高和体重。身高和体重的测量完成后，自动语音播报测量结果。

我们的地址：郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209电话：86-182-03652601联系手机：18203652601 期待您的咨询