

便携式体检一体机 乐佳HW-900A健康体检机 可折叠便携式体检一体机

产品名称	便携式体检一体机 乐佳HW-900A健康体检机 可折叠便携式体检一体机
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	39800.00/台
规格参数	品牌:乐佳 型号:HW-900A折叠式 适用范围:基层体检 下乡体检
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

产品详情

便携式体检一体机 乐佳HW-900A健康体检机 可折叠便携式体检一体机

乐佳HW-900A型便携式体检一体机,可折叠便携式体检一体机

河南乐佳电子科技有限公司厂家专业生产销售的乐佳HW-900A型便携式自助体检一体机，一站式自助体检，语音动画指导，一步步按照提示操作测量，输入性别年龄，对身体进行健康管理测量。

厂家地址：郑州市高新区红松路龙鼎一号楼209

便携式自助体检一体机体检项目：

身高、体重、体型指数、高压低压范围、心率、脂肪量和脂肪率、基础代谢、人体水分量、肌肉率和肌肉量、蛋白质量、骨盐、去脂体重、细胞内外液、血氧饱和度、体温等。

便携式体检一体机 乐佳HW-900A健康体检机 可折叠便携式体检一体机

一、身高体重测量

1.站直站稳站在秤盘中心（头顶对着上面黑色网状探头）

2.然后根据屏幕提示操作，测量身高体重；

二、人体成分测量

- 1.按照屏幕提示输入年龄，，点击测量，然后双手握紧脂肪把手；
- 2.手臂伸直，不要晃动；
- 3.测量注意双手不要太干燥；

三、血氧测量

- 1.血氧探头夹住中指或无名指，然后点击测量；
- 2.保持安静，放松测量；
- 3.注意手指甲不要太长，影响测量；
- 4.手指不要太干燥；

四、体温测量

- 1.根据屏幕提示，点击测量；
- 2.将体温仪探头对准额头，保持2-3cm距离；
- 3.然后扣动体温仪开关测量体温；

便携式体检一体机 乐佳HW-900A健康体检机 可折叠便携式体检一体机技术参数：

操作方式	触摸屏操作，语音视频操作引导
身高测量范围	身高：60-200cm 分度值0.1cm或者0.5cm可调
体重测量范围	体重：8-200kg 分度值0.1kg
血压测量范围	血压：0-39Kpa 脉搏：40-180times/ min
脂肪测量范围	身体脂肪率5.0%-50% 分度值0.5%
基础代谢	385kcal-5000kcal
人体成分	脂肪含量、脂肪率、基础代谢量、体水分量、体水分率、体肌肉量、体肌肉率、蛋白质量、蛋白质率、骨盐重量、去脂体重、细胞内液量、细胞内液率、细胞外液量、细胞外液率
体型	国际通用体型指数BMI
血氧测量范围	35%-100% (± 2%正常状态{75%-100%}， ± 3%运动或弱灌注{50%-74%}， 50%以下未定义
体温测量范围	35 -42 测量时间<2s，测量距离：1-5米，显示分辨率：0.1
显示方式	测量时同步显示操作步骤及测量结果 待机时循环播放图片、宣传健康教育知识
测量结果	自动打印体检报告，扫描二维码，手机端查看测量结果
数据传输	支持RS-232串口、蓝牙、无线数据传输功能，测量结果可以直接传输到体检管理系统或手机APP客户端（蓝牙和无线属于选配）
语音提示	清晰语音自动播报测量结果
外形设计	流线型工艺设计，外观豪华高档
电源电压	110V-240V 50HZ，可选直流12V供电
包装尺寸	70*50*38cm 180*36*20cm
整机净重	43kg

机身根据需要定制折叠，折叠后130cm，方便经常移动，车载下乡体检等.