

# 医用轨道厂家A鑫凯茂医用轨道厂家A医用轨道厂家-规格齐全

产品名称	医用轨道厂家A鑫凯茂医用轨道厂家A医用轨道厂家-规格齐全
公司名称	景县鑫凯茂建筑防护建材商行
价格	6.00/米
规格参数	河北:鑫凯茂 30轨:30*20*1.2mm 河北:景县
公司地址	景县党校东侧
联系电话	15732837257

## 产品详情

医用轨道厂家A鑫凯茂医用轨道厂家A医用轨道厂家-规格齐全

- [医用输液轨道](#)产品特点 1、天轨输液轨道有O型、L型、U型、直型，也可特制各种异型轨道。  
2、在运输、安装过程中不变形，使用时滑动顺畅，承重安全。 3、我们的安装采用塑料胀塞加木螺丝。  
4、市场上的塑料胀塞太杂，安全性没有保障。我们自己开模具，制作加厚、材质优良、韧性好的塑料胀塞。100%保证了使用安全。 医用输液轨道滑车 滑车可在轨道上任意移动，当吊杆承重时，滑车会固定吊杆的位置；滑车结构紧凑合理，减小拐弯半径，滑动灵活、顺畅；滑车轮采用独特加工工艺，应用高科技纳米材料，国内首次真正实现静音、无尘、耐磨；滑车形状会随着轨道弧形自动调整，保证在环型轨道上也可灵活滑动。 医用输液轨道安装方法  
1、首先确定输液天轨的安装位置，一般安装在病床中央的天花板上。需注意避开灯风扇，手术室安装时应注意避开吊塔和无影灯。  
2、测量所购天轨输液架的轨道安装孔孔距，用 8冲击钻头在天花板上钻出深度大于50毫米的孔，打入 8塑料膨胀（注意塑料膨胀打入后应与天花板平齐）。 3、将滑车装入轨道内，用M4×10自攻螺钉将塑料封头安装轨道两端（O型轨无堵头，其接头处应平整对齐，保证滑车能在轨道内自由滑动）。然后用M4×30平头自攻螺钉将轨道安装在天花板上。  
4、安装完毕后，将吊杆挂在吊车挂钩上，检查其运转及其他性能。

医院输液轨道规格A医用输液轨道价格A医用品哪里

这三种轨道都可以做U型和直型，如果您是装在病房里，那么建议您用U型轨，尺寸是1800\*800\*1800mm。如果你是用在输液大厅的话，可以用直轨。直轨可以任意定尺寸。

