

# HW-900B超声波体检机 便携式智能健康体检仪

产品名称	HW-900B超声波体检机 便携式智能健康体检仪
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	22800.00/台
规格参数	品牌:乐佳 型号:HW-900B 适用范围:基层体检 健康测量
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

## 产品详情

### HW-900B超声波体检机 便携式智能健康体检仪

智慧公卫设备，基层健康体检仪器，HW-900B便携式智能健康体检仪HW-900B采用方便读数的LED液晶大显示屏，选用美国senscomp超声波探测器和高精度测重传感器，日本精工热敏打印机及欧姆龙电子血压计，通过微电脑控制,自动测量身高、体重、BMI体格指数、体型（偏瘦/正常/偏胖/肥胖）、血压（高压、低压）、心率，七项测量结果同步数码显示、清晰语音播报并高速热敏打印测量结果。

HW-900B便携式智能健康体检仪主要性能参数：

测量范围：身高测量范围：60-200cm 分度值 0.5cm

体重测量范围：8-200kg 分度值 0.1kg

血压测量范围：0-299mmHg（0-39.9kpa）

脉搏测量范围：40-180times/min

数据输出格式：双向蓝牙传输，可实现数据输出、写入，传输距离：1~100M；RS-232接口备用

打印方式：热敏打印，自动裁纸

语音提示：有语音自动播报测量结果

身高测量方式：超声波测距

体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重

血压测量方式：示波测定法

体型：国际通用体格指数（BMI）

显示方式：主显示屏LED显示屏，显示屏能显示身高、体重、BMI体格指数、体型（偏瘦、正常、偏胖、肥胖）、血压（高压、低压）、心率，待机状态下显示当前日期、时间、室内环境温度

测量过程的注意事项：进入测量状态后，为了更准确、快速的完成身高和体重的测量，应该站稳、站直、平视、挺直身体，不要晃动。

血压测量：测量身高体重之后会有声音提示，开始测量血压。把手臂伸入血压计臂筒，按血压测量按钮即可进入测量状态。测量血压大约需要20秒。

主要功能：

- 1、机身分开包装，方便运输
- 2、机器立柱可以折叠，方便外出携带
- 3、自动测量身高、体重、BMI指数、体型、血压（高压、低压）、心率
- 4、科学计算出被测者的标准体重范围，即BMI值
- 5、测量结果语音播报、数码显示、热敏打印自动切纸
- 6、可连接身高体重测量系统软件，通过RS-232把测量数据上传电脑（可选无线传输），在电脑上实时显示测量动态，并将测量结果生成EXCEL报表。
- 7、实时电子时钟和室内温度显示

HW-900B超声波体检机 便携式智能健康体检仪，在运输时，中间可以方便折叠，折叠后高度一米五高，钢板冲压外壳，底盘后带有小轮子，方便移动，下乡或者外出体检方便携带。