

PE、PVC创可贴 HYGIO

产品名称	PE、PVC创可贴 HYGIO
公司名称	上海贝津洋珩医用品有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HYGIO 产地:中国大陆
公司地址	上海市嘉定工业区汇善路713号
联系电话	021-69169988

产品详情

品牌 HYGIO 产地 中国大陆

本公司生产多种不同材料和不同尺寸的创口贴。

材质：pe、pvc、弹力布

外形：h型；蝴蝶型

适应范围:主要用于小伤口止血和保护伤口。使用方法:

1 先用酒精或碘酒消毒伤口；

2 撕开单包装袋贴在创口即可。注意事项：1、本产品包装破损或超过有效期不得使用。2、拆封后忌接触中间防粘层。3、本品为一次性使用。4、使用时发生过敏现象，立即停止使用。5、通风阴凉处保存。

规格：

贝津弹力布创可贴	hygioplaster ef	38x38mm	盒(box100"
贝津弹力布创可贴	hygioplaster ef	40x20mm	盒(box100"
贝津弹力布创可贴	hygioplaster ef	72x19mm	盒(box100"
贝津弹力布创可贴	hygioplaster ef	76x25mm	盒(box100"
贝津弹力布创可贴	hygioplaster ef	72x50mm	盒(box100"
贝津弹力布创可贴	hygioplaster ef	60x46mm	盒(box100"
贝津弹力布创可贴	hygioplaster ef	76x38mm	盒(box100"
贝津蓝色可探测创可贴	hygioplaster blue	38x38mm	盒(box100"
贝津蓝色可探测创可贴	hygioplaster blue	40x20mm	盒(box100"

贝津蓝色可探测创可贴	hygioplaster blue	72x19mm	盒(box100"
贝津蓝色可探测创可贴	hygioplaster blue	76x25mm	盒(box100"
贝津蓝色可探测创可贴	hygioplaster blue	72x50mm	盒(box100"
贝津蓝色可探测创可贴	hygioplaster blue	60x46mm	盒(box50"s
贝津蓝色可探测创可贴	hygioplaster blue	60x46mm	盒(box100"
贝津蓝色可探测创可贴	hygioplaster blue	63x19mm	盒(box100"
贝津蓝色可探测创可贴	hygioplaster blue	76x38mm	盒(box50"s
贝津蓝色可探测创可贴	hygioplaster blue	76x38mm	盒(box100"
贝津肤色色防水创可贴	hygioplaster washproof pe	25mmspot	盒(box100"
贝津肤色色防水创可贴	hygioplaster washproof pe	38x38mm	盒(box100"
贝津肤色色防水创可贴	hygioplaster washproof pe	40x20mm	盒(box100"
贝津肤色色防水创可贴	hygioplaster washproof pe	72x19mm	盒(box100"
贝津肤色色防水创可贴	hygioplaster washproof pe	76x25mm	盒(box100"
贝津肤色色防水创可贴	hygioplaster washproof pe	60x46mm	盒(box100"
贝津肤色色防水创可贴	hygioplaster washproof pe	76x38mm	盒(box100"
贝津肤色色防水创可贴 p164	hygioplaster washproof pe	72x50mm	盒(box100"
贝津肤色色防水创可贴	hygioplaster washproof pe	63x19mm	盒(box100"