

# 超声波身高体重测量仪 乐佳HW-ZX便携式身高体重测量仪

产品名称	超声波身高体重测量仪 乐佳HW-ZX便携式身高体重测量仪
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	11800.00/台
规格参数	品牌:乐佳电子 型号:HW-ZX 便携式:机身折叠便携式设计
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

## 产品详情

超声波身高体重测量仪 乐佳HW-ZX便携式身高体重测量仪

HW-ZX带轮子可移动体检秤，折叠身高体重秤详情介绍：

带轮子可移动体检秤，折叠身高体重测量仪外壳美观，使用简单方便，此身高体重仪能够的称量出人的身高体重，我司的身高体重仪现在已经远销全国各地，需要的朋友可以直接。

本身高体重仪是为测量身高、体重设计制造的，它以可靠的硬件设计和科学的软件技术相结合，采用MCS-51单片微处理技术和高速、高精度A/D转换技术，实现身高和体重的自动测量。测量结果既可以显示和打印出来，又能与计算机通讯联网，把数据传给计算机，以实现进一步的处理，还特别设计了语音报告检测结果的功能、可广泛用于医院，学校，体检站等场合的身高，体重的测量、

身高体重仪产品参数：

- 1、身高测量方式：超声波测距，采用进口探头，测量数据稳定可靠，并有自动温差补偿功能
- 2、体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重
- 3、血压测量方式：示波测定法
- 4、体型：通用体质指数（BMI）

- 5、显示方式：数字LED大屏幕
- 6、测量速度：不小于480人次/小时
- 7、打印方式：测量完立即打印，自动裁纸
- 8、语音提示：有
- 9、数据输出格式：RS-232
- 10、电源电压：AC100V-240V50Hz

身高体重仪使用方法：

将秤放在确实、平整的地板上（地板不平或地毯会影响准确度）。

正常使用时，可直接上秤。

请平稳地踏上秤面，保持身体平衡，待站稳后，秤即可显示体重和播报体重值，稍等片刻后，秤会再显示身高和播报身高。

每次测量时，身高显示稳定10秒会返回到归零显示，归零显示8秒后秤会自动关机。

温馨提示：网上写出的产品价格只是相接近的，并不是准确价格，需要了解身高体重仪价格详情的朋友可以直接销售咨询，感谢您的支持与理解！

产品：

身高体重测量仪，超声波体检机，智能健康体检设备

身体质量指数BMI，身体质量指数（Body Mass Index，简称BMI），亦称克托莱指数，是目前国际上常用的衡量人体胖瘦程度以及是否健康的一个标准。

正常情况下，人的身高和体重的标准是以体重指数表示的，计算方法是体重（公斤）除以身高（米）的平方，体重指数在18-24%之间都属于正常。

较普遍采用的计算方法有两种：

一种是：

成年： $〔\text{身高}(\text{cm})-100〕 \times 0.9 = \text{标准体重}(\text{kg})$

另一种是：

男性： $\text{身高}(\text{cm})-105 = \text{标准体重}(\text{kg})$

女性： $\text{身高}(\text{cm})-100 = \text{标准体重}(\text{kg})$

以上两种计算方法,基本已被广泛采用.

另外,最近科学院还推出一计算中国人理想体重的方法：

北方人理想体重=(身高cm-150) × 0.6+50(kg)

南方人理想体重=(身高cm-150) × 0.6+48(kg)