

身高体重测量仪便携式

产品名称	身高体重测量仪便携式
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	品牌:乐佳电子 型号:HW-700Z 适用范围:学校 体检中心 卫生院
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

产品详情

身高体重测量仪便携式

带轮子可折叠可移动体检秤，折叠身高体重测量仪外壳美观，使用简单方便，此身高体重仪能够的称量出人的身高体重，我司的身高体重仪现在已经远销全国各地，需要的朋友可以直接来电咨询下单，包运包售后。

身高体重测量仪便携式乐佳HW-700Z型;

HW-700Z折叠身高体重测量仪

HW-700Z特点：

- 1 全部磨具精加工，外观精巧，做工细腻
- 2 铝合金拉伸成型，重量轻。可以折叠，折后1.2米高，方便携带。
- 3 带小轮子，方便车上或室内移动。

身高测量方式: 超声波测距(美国原装探头并实现温差补偿)

体重测量方式:精密平衡梁式压力传感器称重，秤盘采用冷板冲压成型（非铸铁）。

体型: 1 英寸大LED显示国际通用体格指数(BMI)。科学计算，精确分析。体型自动判断，偏瘦，偏胖，正常、肥胖

显示方式:主显示屏LED显示屏 显示日期、时间、温度

测量时显示身高、体重、BMI

测量范围: 身高测量范围：60-200cm 分度值0.1cm

体重测量范围：8-200kg 分度值0.1kg

测量速度：480次/小时

语音提示:有语音自动播报测量结果

数据输出格式:RS-232 连接电脑，可以存储电脑，打印
电源电压:交流（照明电）：12V 电源适配器供电
功耗:待机时功率： 8 W 测量时功率： 1 2 W
平均耗电量： 1 0 W
外形设计:符合人体工程学

身高体重仪使用方法：

将秤放在硬实、平整的地板上（地板不平或地毯会影响准确度）。

正常使用时，可直接上秤。

请平稳地踏上秤面，保持身体平衡，待站稳后，秤即可显示体重和播报体重值，稍等片刻后，称会再显示身高和播报身高。

每次测量时，身高显示稳定10秒会返回到归零显示，归零显示8秒后秤会自动关机。

温馨提示：网上写出的产品价格只是相接近的，并不是准确价格，需要了解身高体重仪价格详情的朋友可以[直接销售咨询](#)，感谢您的支持与理解！