

社区健康体检一体机 HW-900A多功能体检机

产品名称	社区健康体检一体机 HW-900A多功能体检机
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	39800.00/台
规格参数	品牌:乐佳电子 型号:HW-900A 适用范围:医院 社区 体检机构
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

产品详情

社区健康体检一体机 HW-900A多功能体检机

乐佳HW-900A智能体检一体机 社区自助智能健康管理一体机
医院体检中心多功能健康体检一体机，智能健康体检机

社区医院健康体检专用智能体检一体机，体检中心多功能自助式健康管理一体机，身高体重血压心率脂肪健康一体机

HW-900A社区自助智能健康管理一体机 医院体检中心【技术范围】

身高测量：范围：60-200cm 精度：0.5cm

体重测量：范围：4-200kg 精度：0.1kg

血压脉搏测量：范围：血压：0-299mmHg(0-39.9kpa) $\pm 3\text{mmHg}$ ($\pm 0.4\text{kpa}$) 内

脉搏：40-180times/min 脉搏数： $\pm 5\%$

身体脂肪率：5.0%-50% 分度值：0.5%

基础代谢：385kcal-5000kcal

水分含量：30%-70%

体温范围：34 -43 分度值：0.1 测量距离1-5CM

血氧范围 70-100

主要功能：

- 一、机器立柱可以折叠，方便外出携带
- 二、自动测量身高、体重、BMI指数、体型、血压（高压、低压）、心率
- 三、测量结果语音播报、数码显示、热敏打印自动切纸
- 四、科学计算出被测者的标准体重范围，即BMI值
- 五、实时电子时钟和室内温度显示
- 六、可连接身高体重测量系统软件，通过RS-232把测量数据上传电脑（可选无线传输），在电脑上实时显示测量动态，并将测量结果生成EXCEL报表。
- 七、机身分开包装，方便运输

血糖测试方法：

- 1、先准备好需要的物品：血糖测试纸和尿酸测试纸（新开一盒的话，内配自动校准器，需要把校准器插入血糖仪校准即可）
- 2、然后取出试纸插入血糖和尿酸插口（注意插入正反，试纸上有箭头提示，插错血糖仪无显示）
- 3、取新的采血针，轻轻扎手指后，把血对着试纸入口，使血液进入测试（两个试纸均需要采血，采血前酒精消毒）
- 4、最后等待测试结果
- 5、血糖正常值是指人空腹的时候血糖值在3.9~6.1毫摩尔/升，血糖值对于治疗疾病和观察疾病都有着指导意义
- 6、尿酸正常值男：202-416umol/l 女：142-339umol/l

社区健康体检一体机

HW-900A多功能体检机，一体化全身智能健康体检机，多功能体检一体机欢迎咨询。