

医用口罩《YY 0469-2011医用外科口罩》

产品名称	医用口罩《YY 0469-2011医用外科口罩》
公司名称	广东省国瑞企业管理服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	龙华区龙华街道大和路金鼎盛科创园A座4楼
联系电话	13510994721 15899785958

产品详情

对于《YY 0469-2011医用外科口罩》的具体技术要求和检测要求，我们现在给大家了解下：

1、外观

口罩外观应整洁、形状完好,表面不得有破损污渍。

2、结构与尺寸

口罩佩戴好后,应能罩住佩戴者的鼻、口至下颌。应符合标志的设计尺寸及允差

3、鼻夹

口罩上应配有鼻夹,鼻夹由可塑性材料制成

鼻夹长度应不小于8.0cm

4、口罩带

口罩带应戴取方便。

每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于10N。

5、合成血液穿透

2mL合成血液以16.0kPa(120mmHg)压力喷向口罩外侧面后,口罩内侧面不应出现渗透。

6、过滤效率

细菌过滤效率(BFE) 口罩的细菌过滤效率应不小于95%

颗粒过滤效率(PFE) 口罩对非油性颗粒的过滤效率应不小于30%。

7、压力差(AP) 防护面具呼吸阻力测试仪

口罩两侧面进行气体交换的压力差 p 应不大于49Pa

8、阻燃性能 口罩可燃性试验机

口罩材料应采用不易燃材料;口罩离开火焰后燃烧不大于5s

9、微生物指标

细菌菌落总数CFU/g : 100

大肠菌群 : 不得检出

绿脓杆菌 : 不得检出

金黄色葡萄球菌 : 不得检出

溶血性链球菌 : 不得检出

真菌 : 不得检出

包装上标志有“灭菌”或“无菌”字样或图示的口罩应无菌。

10、环氧乙烷残留量

经环氧乙烷灭菌的口罩,其环氧乙烷残留量应不超过10ug/g。

11、皮肤刺激性

口罩材料原发性刺激指数应不超过0.4。

12、细胞毒性

口罩的细胞毒性应不大于2级。

13、迟发型超敏反应

口罩材料应无致敏反应。

更多详情请来电咨询国瑞检测林工：15899785958